



AcryPol Set 2

アクリポルセット2

ハトー アクリポル セット 2 ¥8,400

ハトー アクリポルセットの進化版！

- ①より強力な中研磨用レースブラシ=作業時間の短縮！
- ②砂研磨が不要なコンパウンド=作業環境を汚さない！
- ③光沢をより一層深めるための乳液状研磨剤をセットにし新発売！

- ハトーブラシ (レース用) 4280 (L33)×2
- ハトーブラシ (レース用) 520-100/7 (L23)×1
- ハトーブラシ (レース用) 152-80BW (L27)×1
- ハトー ポリスター ポリッシングペースト リンティグレイ 90g×1
- ハトー ポリスター ポリッシングペースト ベージュ 85g×1
- ハトー ポリスター エマルジョン 50ml×1

Step1 中研磨

研磨剤含有スコッチブライトを豚毛ブラシで挟んだレースブラシ。ポリスターリンティグレイと共に使用することで、砂研磨と同等以上に面を均します。

スコッチブライトとコンパウンドのW研磨パワーにより、素早く研磨！

シリコンポイントもしくはハトー ブラシ (HP用) 250-25HP D1で、カーボラダムポイントの切削跡を均すことで、作業時間を短縮



品番	1,400 4280 L33	ハトーブラシ (HP用) 250-25HP D1 ¥3,500/12本
ブラシ形状	ストレート	
列数	4	
硬さ	ミディアム	
材質	豚毛2列+スコッチ2列	
径・内/外	40mm/80mm	
価格	¥1,400	

Step2 光沢研磨

天然の鹿革は、季節や部位により厚さや硬さが均一ではありません。本製品は、人工の化学繊維を使用し均一性を追求したレースブラシ。ポリスター ベージュと共に使用することで、艶やかな光沢を素早く放ち、保護膜を作ります。




バラけるので、熱を発散！

品番	UniFix 1,400 520-100/7 L23	
ブラシ形状	ストレート	
列数	7	
硬さ	ソフト	
材質	マイクロファイバー	
径・内/外	40mm/100mm	
価格	¥2,500	

Step3 最終光沢研磨

綿糸バフで前工程のコンパウンドを拭き取ることで、より深いツヤを放ちます。ポリスター エマルジョンと共に使用することで、その光沢をより一層深めます。

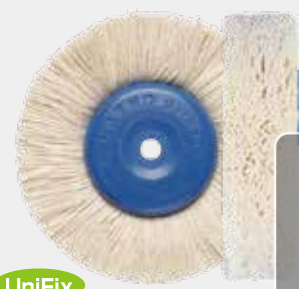

ハンドピースでもよく光る！

品番	UniFix 1,400 152-80BW L27	ハトーブラシ (HP用) 150-22HP W1 ¥4,000/12本
ブラシ形状	ストレート	
径	18mm	
硬さ	ソフト	
材質	綿糸バフ	
径・内/外	40mm/80mm	
価格	¥1,600	

水を使わないので、砂研磨のように作業環境が汚れない！



ポリスターリンティグレイ
90g ¥1,100 [セット品]
300g ¥2,200

カルナバワックス配合で、研磨面に保護層を作り、汚れ付着を防止！



ポリスターベージュ
85g ¥1,100 [セット品]
300g ¥2,200

研磨対象面に指で薄く塗布してバフ掛けだけ！



ポリスター エマルジョン
50ml ¥1,700 [セット品]
125ml ¥2,600

レジン、非貴金属合金、貴金属、コバルトクロム、チタン、コンジット、セラミック等、あらゆる歯科材料に使用可能な最終研磨用液体研磨剤。



本キットの使用方法を動画で公開中



販売名: ハトー アクリポル セット 2 一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00041000188号