

硬化型義歯床適合診査材との併用で効率 UP!



ペーストタイプの義歯床適合診査材

ミジィ P.I.P. ペースト チューブ式

フルデンチャー・パーシャルデンチャーの異常位を正確に、カンタンに確認できます。

特長

- ◎ 計量・練和等の前処理不要でケアタイムを短縮
- ◎ 硬化しないので、
 - ☆ 診査時間を短縮
 - ☆ 義歯を動揺させた時のアタリがわかる
 - ☆ 細かいアタリが判別可能
- ◎ 厚みが出ないので精度の高い診査が可能
- ◎ 流動性が良く均一な硬さで塗布しやすい

P.I.P. はその名前の通りプレッシャー・インジケーター・ペーストといい、義歯の強く当たる場所や擦れる場所を的確に教えてくれるものです。

使い方は簡単! 義歯内面にペーストを刷毛で塗り口腔内に入れるだけで刷毛目が濡れたりポッカリ色目が抜けたりして当たる場所がハッキリわかります。

更に粘膜面に当たりがあり発赤しているところにスポットで置くと義歯に転写されるので当たる場所もハッキリ教えてくれます。

義歯の当たりでお悩みの先生には是非ご使用いただきたい最良の商品です。



推薦者
土屋 公義
日本橋土屋歯科医院
院長



ミジィ P.I.P. ペーストチューブ式
ファーストトライアルセール

開始日 2018年9月3日(月)

ミジィ P.I.P. ペースト
チューブ式 29g
定価 ¥4,600

➔ お試し価格
¥1,980

数量限定

チューブタイプ
お試し価格!

■ 使用方法



step1

- ① 義歯床の表面をよく乾燥させる
 - ② P.I.P. ペーストを練和紙に取る
 - ③ 筆の痕が残るように一定方向に薄く塗る
- ※ 粘い唾液が出る患者には P.I.P. スプレーを口腔内に直接吹き付け、軽く水ですすいでいただきます



step2

- ① 塗布した義歯床に P.I.P. スプレーを吹き付けることで口腔内にペーストが付着せず、義歯床の異常位を確認しやすくなる
- ② 義歯床を口腔内に装着し、口を閉じて軽く押さえる



step3

- ① 義歯床を慎重に外し、ペーストの剥げた部分を除去する
- ② 圧痛や違和感がなくなるまで、最初から工程を数回繰り返す



step4

違和感がなくなり剥げた部分がなくなれば、P.I.P. リムーバーを染み込ませたティッシュペーパー等でペーストをきれいに拭き取ること

ミジィ P.I.P. ペースト 各種容器



ペースト ジャー式 ¥5,800 (税別)
容量 36g
筆: ハード・ソフト 各1本
ヘラ: 5本 練和紙: 1冊



ペースト ポンプ式 ¥9,500 (税別)
容量 113.5g
筆: ハード・ソフト 各1本
練和紙: 1冊

ミジィ P.I.P. ペースト アクセサリー



リムーバー ¥1,300 (税別)
容量 120ml



スプレー ¥2,300 (税別)
(シリコン乳液)
容量 120ml

掲載商品の価格に消費税は含まれておりません。ミジィ P.I.P. ペースト 届出番号 27B2X00041000085 号 ミジィ P.I.P. スプレー 届出番号 27B2X00041000086 号 一般医療機器 製造販売元 サンデンタル株式会社

義歯洗浄の決定版

カンタン・すばやく・どこでも義歯洗浄

ラバラックムース



家庭用

介護施設
院内用

ラバラックムース家庭用 150ml ¥1,100 (患者価格 ¥1,300)
ラバラックムース家庭用 200ml ¥1,270 (患者価格 ¥1,500)
ラバラックムース 600ml ¥3,800

カンタン洗浄=短い洗浄時間
①ムース状で義歯にかけるだけ
②流水下に放置するだけ
洗浄することで除菌・脱臭が可能!

ガンコな汚れも一発で吹き飛ばす!

ラバラックD



院内用

ラバラックD 1.2L ¥4,500

超音波洗浄器併用で強力洗浄
● 着色・ブランク・タンパク基質除去
● 義歯ブラシによる擦り磨き洗い不要
洗浄することで除菌・脱臭が可能!

チェアサイドでの義歯の研磨にオススメ

ハトー ハブラスディスク PRO チェアサイド義歯研磨キット

- コンパウンド不要!チェアサイドを汚さない!!
- 滅菌可能!(耐熱温度134℃)
- 柔軟性のある樹脂製ブラシで、形態が変形しにくい!
- 風を巻き込む形状で、研磨熱の発生を防ぐ!



義歯の中研磨



義歯の中光沢研磨



義歯の光沢研磨

滅菌
可能

研磨剤
いらす

カンタン
3ステップ

ダストが
少ない

訪問診療
時の研磨

原寸大

8,000



品番	905.1-14PP	903.2-14PP	904.3-14PP
荒さ	ミディアム(P120)	ファイン(P400)	ベリーファイン(P800)
直径	14mm	14mm	14mm
入数	1本	1本	1本
価格	¥1,600	¥1,600	¥1,600

●本品はマンドレルタイプです。歯科用マイクロモーター等に装着しご使用ください

お得なスターターキット



ハトー ハブラスディスク PRO
チェアサイド義歯研磨キット
価格 ¥4,500/セット