

# ラバラック D

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液  
歯科医院 / 歯科技工所専用

義歯ブラシによる**手洗い一切不要 !!**  
超音波洗浄器でカンタン、手間いらず！

## ラバラックD サンクスセール

キャンペーン期間:2018年2月1日(木)~2018年3月29日(木)

次亜塩素酸ナトリウム2%で強力洗浄！  
超音波洗浄器との併用で洗浄がラク！



+



=

専用容器 L  
無料

ラバラックD サンクスセール  
ニュー洗浄セット  
ラバラックD 1.2L ¥4,500+  
専用容器 L ¥800  
**¥4,500**



+



=

特別  
価格

ラバラックD サンクスセール  
5L(2個パック)  
通常価格 ¥27,000  
**¥22,500**



# ラバラック D

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液

歯科医院 / 歯科技工所専用

## 使用方法



### STEP 1

義歯や補綴物を専用容器で受け取ります。




### STEP 4

汚れが落ちているか確認をして、ラバラックDの廃液を捨てます。



### STEP 2

汚れに応じて原液～3倍に希釈したラバラックDで洗浄物を浸します。

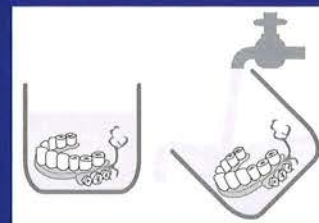

### STEP 5

水を入れて1～2回すすいでください。



### STEP 3

5～10分間超音波洗浄をします。



### STEP 6

専用容器に新しい水を入れて、5分間程、超音波洗浄をします。塩素臭とぬめりを取り除くために必ず実行してください。

**注** 金属部分に次亜塩素酸が残留したまま放置すると、金属腐食の原因にもなります。

成分 次亜塩素酸ナトリウム 2.0%  
界面活性剤 4.5%  
防錆安定剤

性状 アルカリ性 pH約12

用途 レジン床義歯 / 金属床義歯 / 脱離冠 / 脱離ブリッジ / ナイトガード / 矯正用リテーナー / スプリント / マウスガード / テンポラリークラウン / テンポラリーブリッジなどの洗浄

特長 ●ラバラック D は義歯や補綴物などに付着したブランク、タンパク基質、ヤニ、茶シブなどを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。  
●次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。  
●防錆剤を配合していますので、金属にも安心して使用できます。

## 発注書

お取引先販売店様にご用命頂くか、下記内容をご記入の上 FAX.06-6245-7690 に送信ください。

貴歯科医院名・貴技工所名

ご担当者名

ご住所

TEL

( )

FAX

( )

お取引先販売店名

お取引先販売店ご担当者様名

ラバラック D サンクスセール ニュー洗浄セット

セット

ラバラック D サンクスセール 5.0L (2個パック)

セット

注意：ラバラック D サンクスセール 5.0L (2個パック) は 1セット (2個パック) 単位での発注を宜しくお願いします。

表示価格は全て消費税を含みません