

ラバラックD

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液
歯科医院 / 歯科技工所専用

義歯ブラシによる**手洗い一切不要！！**
超音波洗浄器でカンタン、手間いらず！

ラバラックD サンクスセール

キャンペーン期間:2019年2月21日(木)~2019年4月19日(金)

次亜塩素酸ナトリウム2%で強力洗浄！
超音波洗浄器との併用で洗浄がラク！



+



=

専用容器L
無料

ラバラックD サンクスセール
ニュー洗浄セット
ラバラックD 1.2L ¥4,500+
専用容器L ¥800
¥4,500



+



=


特別
価格

ラバラックD サンクスセール
5L(2個パック)
通常価格 ¥27,000
¥22,500




STEP 1

義歯や補綴物を専用容器で受け取ります。

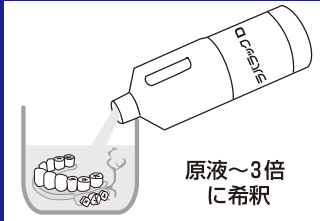

STEP 2

汚れに応じて原液～3倍に希釈したラバラックDで洗浄物を浸します。

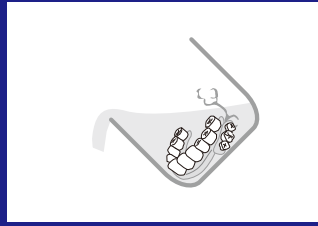


STEP 4

汚れが落ちているか確認をして、ラバラックDの廃液を捨て



STEP 3

5～10分間超音波洗浄をします。

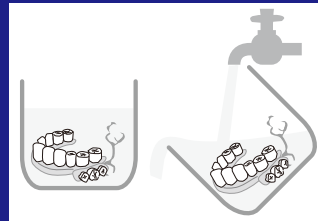

STEP 5



STEP 6

注 金属部分に次亜塩素酸が残留したまま放置すると、金属腐食の原因にもなります。