

院内環境にやさしい! 除菌・消臭・洗浄スプレー

ラバラックS[®] 1000 ppm

〈次亜塩素酸ナトリウム 0.1% 調整液〉

ラバラックS[®] 5000 ppm

〈次亜塩素酸ナトリウム 0.5% 調整液〉

除菌

脱臭

防錆

洗浄



〈ラバラックS 1000〉



〈ラバラックS 5000〉

特長

抗菌効果が高い
次亜塩素酸ナトリウムの
濃度安定化

防錆剤配合で
金属にも使用できます

用途によって使いわける、
除菌・脱臭・防錆・洗浄

容量

500 mL

価格

1,100円

〈税別〉

用途によって使いわけ、カンタン**除菌・脱臭・防錆・洗浄!!**


ラバラックS 1000ppm

ラバラックS 5000ppm


ラバラックS 1000の主な使用法

◎テーブル、スピットン、スリッパ・待合室のソファ等の除菌・洗浄に!

ガーゼ等にしみ込ませ拭いた後、3分後水拭き

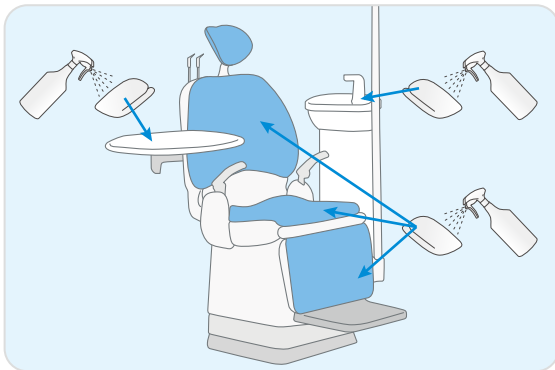

◎印象採得時の印象面に!

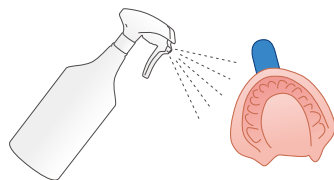



流水洗浄後
ラバラックS 1000を
スプレーし
再び流水洗浄の後、
石膏注入

※スプレー、噴霧後の水洗いは十分に行ってください。(30秒以上が目安です。)

ラバラックS 5000の主な使用法

◎診療室内(床、ドア、トイレ等)除菌・洗浄に!

手袋を着用しスプレー後、水拭き

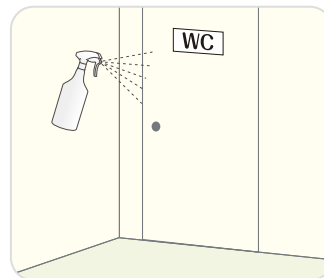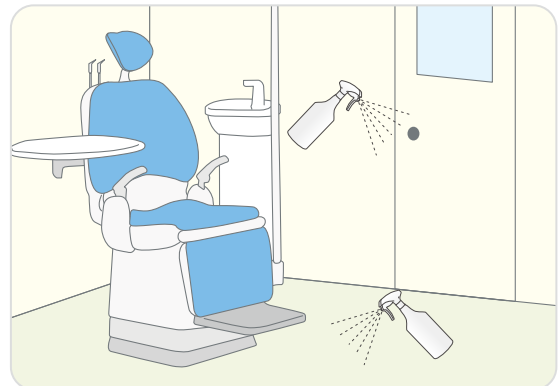

【使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 他の製品や酸と混ぜての使用は絶対に避けてください。
- 金属に使用する場合は、そのまま放置しますとサビの原因になります。
- 使用時には手袋・保護メガネを着用してください。
- 万一、目に入ったときは、すぐに流水で洗い流し、必ず医師の手当を受けてください。
- 皮膚に付いたときは、流水でぬめり感が無くなるまで洗い流してください。
- 保管は直射日光の当たらない場所に保管してください。(常温保存)
- 液が衣類などの繊維につくと脱色する恐れがあるので、ご注意ください。(ラバラックS 5000について)

【使用できない器具の材質】

- アルミ製品・メッキ製品・カーバイト鋼(※一部のカーバイト鋼につきましては変色の可能性があります。)

ラバラックS 1000 / ラバラックS 5000

【用途】 除菌・脱臭・防錆・洗浄

【性状】 無色透明でわずかに塩素臭がある

【成分】 (ラバラックS 1000)
次亜塩素酸ナトリウム 0.1%、安定剤、防錆剤
(ラバラックS 5000)
次亜塩素酸ナトリウム 0.5%、安定剤、防錆剤

【内容量】 500mL

【価格】 1本 **1,100**円(税別)

発売元

SD サンデンタル株式会社

(本社) 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

(東京営業所) 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

(福岡営業所) 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

■お問い合わせ・ご用命は

サンデンタルホームページ <http://www.sundental.jp>

※掲載商品の価格は小売価格で2018年3月1日現在のものです。仕様及び外観は、製品改良の為、予告なく変更することがあります。