

ミラーを濡らさず温め、口腔内で曇りません

撮影中にミラーが曇らない！




拭き取る手間が省けて便利！

撮影用具が1つにまとめ便利！

透明で、お湯の量が分かりやすい！



使用前の準備

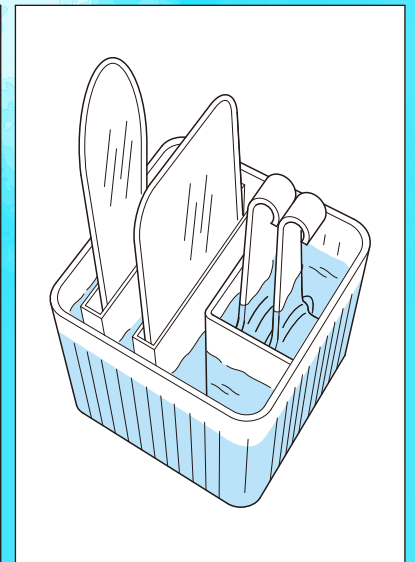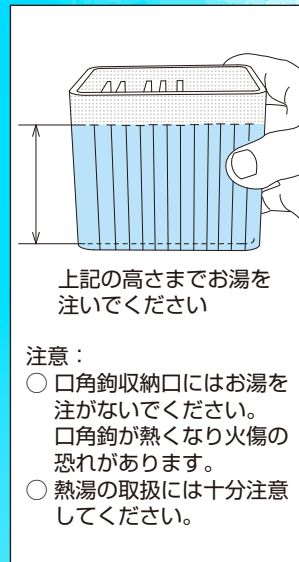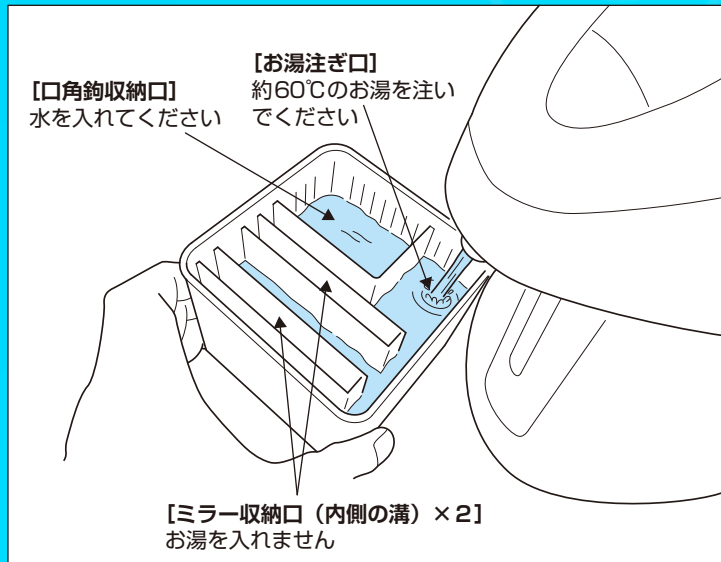

使用方法

口腔内ミラーを湯器ちゃんから抜き取り、口腔内に入れて撮影するだけ

お湯を入れず、口腔内ミラーや口角鉤の保管容器として使用



ミラー収納口まわりのお湯により鏡面が温まり、口腔内に入れても曇りません



洗浄方法

水または中性洗剤で洗浄し、各種消毒剤で消毒してください  
オートクレーブ滅菌 (120℃以下) が可能です

注意 ※ 乾燥工程・ガス滅菌・ドライクレーブ・紫外線殺菌はお避けください  
※ 次亜塩素酸系消毒剤は使用しないでください

●口角鉤口腔内撮影用ミラーは含まれておりません。●掲載商品の価格は小売価格で、2018年2月1日現在のものです。●価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

口腔内撮影用ミラー保温 / 保管容器 **湯器ちゃん**

価格 **7,500円**

寸法: 100×100×80(mm) 材質: ポリカーボネート  
販売元 有限会社サンフォート 埼玉県坂戸市溝端町 17-20