

# NEW O·K Micro Exca

3次元的な根管内の感染源除去を可能にする  
マイクロ用 インスツルメント



0.2-45°



考案者

岡口守雄 先生 (東京都千代田区 開業)

柿沼秀明 先生 (さいたま市浦和区 開業)

近年、歯科治療にマイクロスコープの導入が進み、それに対応した医療器具が求められています。

歯内療法は感染源を除去し、無菌化することが基本的原則です。しかしGPの除去や、フィン・イスマス・側枝・アンダーカット、さらにパーフォレーション部や根尖孔外などの感染源除去は、従来の器具だけでは難しいのが現状です。そこで開発されたのが、3次元的な根管内の感染源などを、明視野下で除去可能とするインスツルメント「NEW O·K マイクロエクスカ」です。

## NEW O·K マイクロエクスカの臨床例



ガッタパーチャの除去



MBIIの感染源の除去



破折片の除去



アンダーカット部の感染源除去



破折線の感染源除去



感染源の除去

【様々な根管内に対応できる、豊富なバリエーション】 は裏面をご覧ください。

# NEW O·K Micro Exca

STS

様々な根管に対応できる、豊富なバリエーション

全 20 タイプ ブレード 向き・角度・幅 シャンク 長さ


## NEW O·K Micro Exca マイクロエキスカ

ブレードの向き




## NEW O·K Micro Exca マイクロエキスカ


ブレードの角度

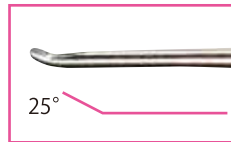

**0.3-25° 0.3L-25°**  
30号以上の根管や根尖部、  
GPの根管内面の剥離に使用

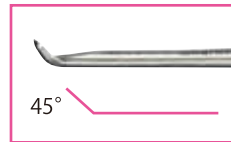


**0.2-45° 0.3-45° 0.3L-45°**  
40号以上の根管や GP の  
剥離・除去に使用

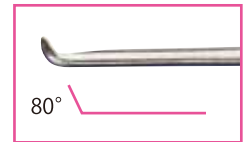

**0.2-80° 0.3-80° 0.3L-80°**  
60号以上の根管や根尖部  
のアンダーカットに使用


## NEW O·K Micro Exca マイクロエキスカ

ブレードの幅

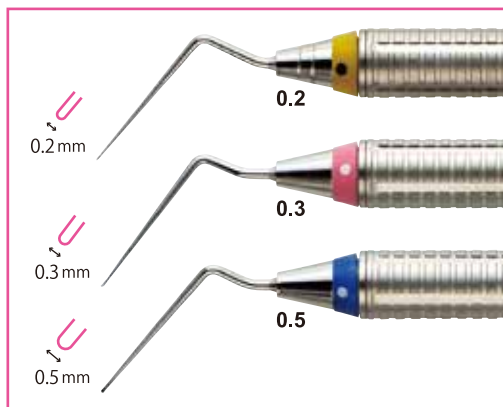

## NEW O·K Micro Exca マイクロエキスカ

シャンクの長さ

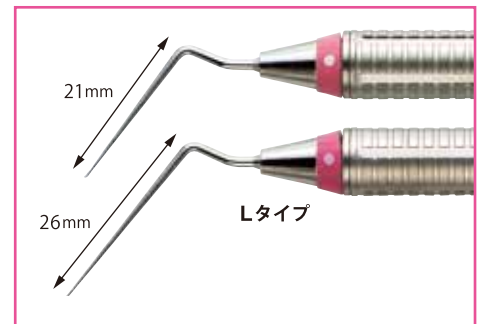

● Lタイプ(26mm)は幅0.3mmのみ

## NEW O·K Micro Exca

| 品番       | リングカラー | 幅     | 長さ   | 角度  | 向き  |
|----------|--------|-------|------|-----|-----|
| 0.2-45°  | ●      | 0.2mm | 21mm | 45° | 左/右 |
| 0.2-80°  | ●      | 0.2mm | 21mm | 80° | 左/右 |
| 0.3-25°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 25° | 左/右 |
| 0.3-45°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 45° | 左/右 |
| 0.3-80°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 80° | 左/右 |
| 0.3L-25° | ●      | 0.3mm | 26mm | 25° | 左/右 |
| 0.3L-45° | ●      | 0.3mm | 26mm | 45° | 左/右 |
| 0.3L-80° | ●      | 0.3mm | 26mm | 80° | 左/右 |
| 0.5-45°  | ●      | 0.5mm | 21mm | 45° | 左/右 |
| 0.5-80°  | ●      | 0.5mm | 21mm | 80° | 左/右 |

## NEW O·K Micro Exca UL type

| 品番          | リングカラー | 幅     | 長さ   | 角度  | 向き  |
|-------------|--------|-------|------|-----|-----|
| UL 0.2-45°  | ●      | 0.2mm | 21mm | 45° | 上/下 |
| UL 0.2-80°  | ●      | 0.2mm | 21mm | 80° | 上/下 |
| UL 0.3-25°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 25° | 上/下 |
| UL 0.3-45°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 45° | 上/下 |
| UL 0.3-80°  | ●      | 0.3mm | 21mm | 80° | 上/下 |
| UL 0.3L-25° | ●      | 0.3mm | 26mm | 25° | 上/下 |
| UL 0.3L-45° | ●      | 0.3mm | 26mm | 45° | 上/下 |
| UL 0.3L-80° | ●      | 0.3mm | 26mm | 80° | 上/下 |
| UL 0.5-45°  | ●      | 0.5mm | 21mm | 45° | 上/下 |
| UL 0.5-80°  | ●      | 0.5mm | 21mm | 80° | 上/下 |

● ULタイプは、左右ではアクセスしにくい部位に使用します。

販売名：NEW O·K マイクロエキスカ 一般的名称：歯科用エキスカベータ 医療機器届出番号：08B3X10007000049 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）