

# がんこ一発

スピットン・バキューム・排管内の

**強力** 除臭 除菌 ヌメリ取り

広範囲の微生物（細菌・糸状性細菌・真菌〈カビ類〉・酵母など）に除菌・抗菌作用があります。  
ヌメリ・スライム除去剤が、悪臭の原因を分解、除去します。  
3種類の複合除菌剤による相乗効果で、各種の細菌を除菌します。

粘性タイプで管内壁への  
付着力を強化!


ユニット器具を  
腐食させません。

排水に問題がある成分は  
含まれておりません。

取扱いが簡単で  
作業時間がわずかです。

ファイバースコープによる視察・撮影

スピットン排水管内

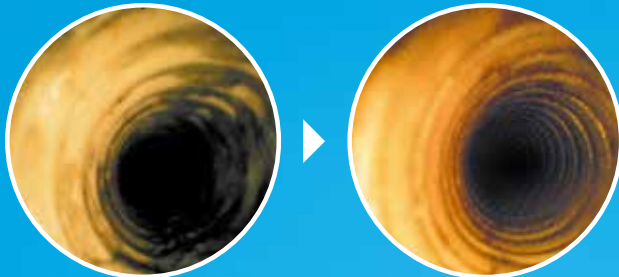

使用前

がんこ一発 使用後

バキューム・排管内



使用前

がんこ一発 使用後

スピットン・バキューム・配管内は、唾液・血液・脂肪質・タンパク質などがへばりつき、ヌメリ、スライムとなります。さらに、ほど良い湿度と温度により、細菌・糸状性細菌・真菌(カビ類)・酵母などの温床となっています。そのために異臭が発生します。また衛生面に問題があり、広域には院内感染にまで及ぶ危険性があります。



専用計量カップ

■フィールド試験に於いて、採取した微生物の培養試験

	細菌	糸状性細菌	酵母	真菌
スピットン排水管内				
バキューム・排管内				

■フィールド試験に於いて採取した微生物に対する抗菌性試験結果

	菌種	濃度	液体培地			液体培地		個体培地	
			1日後	3日後	7日後	3日後	7日後	3日後	7日後
スピットン排水管内	細菌 (菌数 6×10 <sup>4</sup> /mL)	0ppm	—	+	+		+++	+	
		10ppm	—	—	—		—	—	
		20ppm	—	—	—		—	—	
		50ppm	—	—	—		—	—	
		100ppm	—	—	—		—	—	
	Blank	0ppm	10ppm	20ppm	50ppm	100ppm			
スピットン排水管内	真菌 (菌数 1×10 <sup>4</sup> /mL)	0ppm	—	+	+		+	+	
		10ppm	—	—	—		—	—	
		20ppm	—	—	—		—	—	
		50ppm	—	—	—		—	—	
		100ppm	—	—	—		—	—	
	Blank	0ppm	10ppm	20ppm	50ppm	100ppm			
バキューム・排管内	細菌 (菌数 1×10 <sup>4</sup> /mL)	0ppm	—	+	+		++	++	
		10ppm	—	—	—		—	—	
		20ppm	—	—	—		—	—	
		50ppm	—	—	—		—	—	
		100ppm	—	—	—		—	—	
	Blank	0ppm	10ppm	20ppm	50ppm	100ppm			
バキューム・排管内	真菌 (菌数 1×10 <sup>4</sup> /mL)	0ppm	—	+	+		+++	+++	
		10ppm	—	—	—		—	—	
		20ppm	—	—	—		—	—	
		50ppm	—	—	—		—	—	
		100ppm	—	—	—		—	—	
	Blank	0ppm	10ppm	20ppm	50ppm	100ppm			

〈液体培地〉 —：全く増殖しない +：培地がかなり濁っている(完全に増殖) 〈個体培地〉 —：全く増殖しない ++：一面に増殖(少ない) +++：一面に増殖(多い)

◎商品名	がんご一発〔除臭・除菌・ヌメリ取り〕
◎ご使用方法	〈スピットン〉終業時、専用カップで約50mLをスピットン排水口に流してください。数分後、約100mLの水を同様に流してください。 〈バキューム／排唾器〉専用カップに約20～30mLを注ぎ、そのままバキュームで吸引してください。数分後、約100mLの水を同様に吸引してください。
◎成分	除菌剤・界面活性剤・増粘剤・他

**歯科医院専用**

【内容量】 1,000mL  
専用計量カップ付き

【価格】  
**4,500** 円(税別)

発売元 **SD サンデンタル株式会社** ■お問い合わせ・ご用命は

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号  
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690  
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号  
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090  
〈福岡営業所〉〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号  
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

サンデンタルホームページ <http://www.sundental.jp>

※カタログ記載の内容は予告なく変更されることがあります。