

ダウエルピン穿孔用ドリルホルダー


Hole・Ta・Kun

ホレタくん



ホレタくん 医院価格 ¥14,800 (税抜)

セット内容 本体×1、軸受け部×2、専用スパナ×1
アジャスターピン 13mm・15mm×各1
ダウエルピン マイクロドリル HP用×1

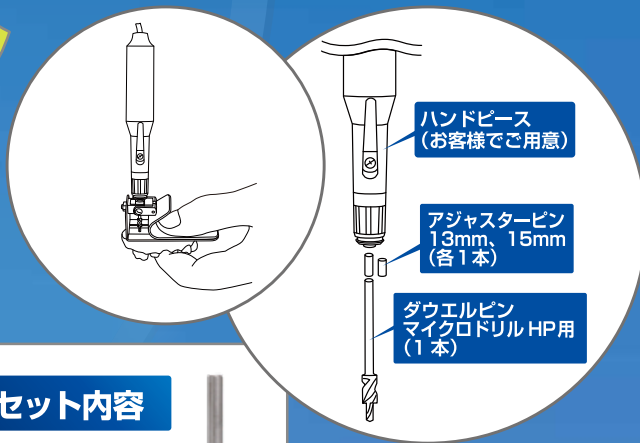

セット内容



詳しい使用方法は YouTube でご覧頂けます。

<http://youtu.be/Hyw63jt5d98>

使用説明



1. 付属のダウエルピン マイクロドリル HP 用をマイクロモーターに装着します。不要な石膏模型を準備し、ダウエルピンを固定する深さを設定するための「A 基準穴」を掘ります。(作製した基準穴は今後も使えます)



2. マイクロモーターから取り外したダウエルピン マイクロドリル HP 用をホレタくんに通します。ドリル先端を「A 基準穴」にしっかり差し込み、マイクロモーターにドリルをロックします。



3. 作業模型にピン穴の位置をマークします。



注意 ダウエルピンマイクロドリル HP 用をマイクロモーターに装着する際、チャックがゆるくてドリルが奥にズレ込んでしまう場合があります。この際は、付属のアジャスターピンを挿入してからダウエルピン マイクロドリル HP をセットしてください。



4. 作業模型に記入したマーク位置にダウエルピン マイクロドリル HP 用先端を合わせ、ズレないように押さえます。



5. マイクロモーターをゆっくりと回転させ、作業模型へ押し「A 基準穴」と同じ深さで垂直な穴が掘れます。

特徴

「ホレタくん」とハンドエンジンがあれば

- 簡単な手作業 (高価な機器は不要、安全設計)
- 平行性を保ち
- 同じ深さに
- 位置ずれ無し

ダウエルピン用の穴が掘れます!



発売元: **SD** サンデンタル株式会社

本社: 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
東京営業所: 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 SDビル1F
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号

TEL.(06)6245-0950
TEL.(03)3836-9347
TEL.(092)482-2318

製造販売元: **M.A.** 有限会社 秋山歯科器具製作所