

Neo

ミラーのくもりどめ

ミラーを浸けるだけでスッキリ!、クッキリ!

CPC〈セチルピリジニウム塩化物〉配合でより衛生的に!

〔容量〕

500mL



特長 1

浸けるだけですっきりくっきり見える!
『Neoミラーのくもりどめ』です。

特長 2

CPC〈セチルピリジニウム塩化物〉配合により
使用中の液をより衛生的に保ちます。

特長 3

便利な小分け容器付です。



Neo ミラーのくもりどめ

用途

デンタルミラーのくもりどめ。

ご使用方法

- 使用済みのミラーは滅菌・消毒後に「Neoミラーのくもりどめ」に浸けてご使用ください。
- そのままで使用いただけますが、自然乾燥やエアースリンジで乾燥させると効果が長持ちいたします。
- 小分け容器のご利用で、衛生的に最後までお使いいただけます。

交換の目安

液交換の目安は、本液50mL使用の場合、臨床使用済みのミラー約50本です。

ご注意

- 飲み込んだり、使用目的以外にはご使用にならないでください。
- 小分け容器に移した液は元に戻さず、ご使用後は廃棄してください。


1 小分け容器に本液を入れる。



2 滅菌消毒済みのミラーを浸ける。



3 エアースリンジで乾燥させる。

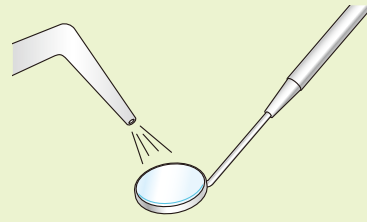

◎菌試験結果 (CPCなし、CPCありの製剤における菌の繁殖比較)

+) 菌の増殖あり (-) 菌の増殖なし

	1分	10分	1時間	6時間	12時間	24時間
CPCなし	+	+	+	+	+	+
CPCあり	-	-	-	-	-	-

注) 時間は液剤と菌との接触時間 ※アグサジャパン株式会社試験室調べ

CPCなし



CPCあり



【内容量】

1本 500mL
小分け容器1個付

【価格】

2,200円(税別)

販売元

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

〈福岡営業所〉〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

サンデンタルホームページ <http://www.sundental.jp>

製造元

アグサジャパン株式会社

■お問い合わせ・ご用命は