


義歯洗浄剤

ラバラックムース

- ラバラックムースは義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク性被膜やヤニ、茶シブなどを短時間で強力に溶解・脱臭します。
- 次亜塩素酸ナトリウム3%を安定維持することにより、ムース洗浄を可能にし、洗浄時間を短縮します。
- 防錆剤を配合していますので金属にも安心して使用できます。

使用手順

洗浄時間：約5分

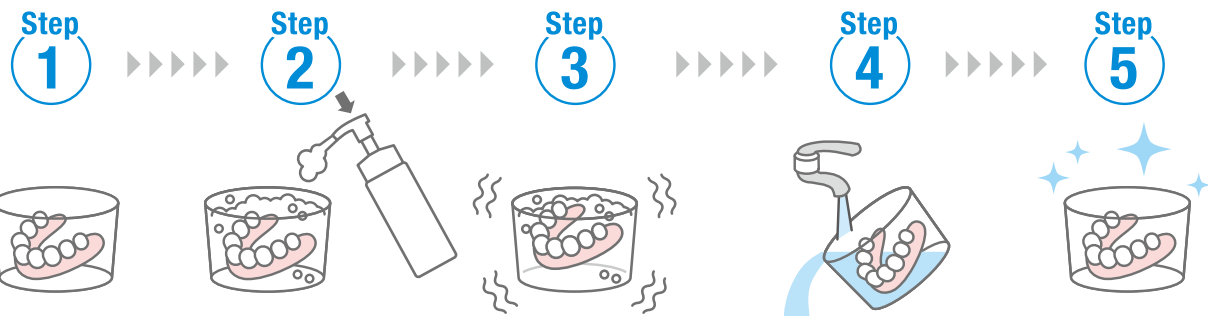

・義歯・補綴物などを洗浄用容器に入れてください。

・義歯全体にラバラックムースをかけてください。

・容器を数回振り、洗浄物とムースをなじませ3～5分置きます。

・流水洗浄を約20秒する事によって、浮き上がった汚れを落とします。

・洗浄用容器も同時に洗浄・除菌。

主な対象施設

歯科医院、訪問歯科、介護施設、一般家庭

主な使用用途

- レジン床義歯
- 金属床義歯
- 脱離ブリッジ
- 矯正用リテーナー
- ナイトガード
- テンポラリークラウン・ブリッジ
- スプリント
- マウスガード

600mL

【成分】
次亜塩素酸ナトリウム 3%
界面活性剤 5%
防錆安定剤

【医院価格】
3,800円 (税別)

200mL

【成分】
次亜塩素酸ナトリウム 3%
界面活性剤 5%
防錆安定剤

【患者価格】
1,500円 (税別)

使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 他の製品と混ぜての使用は絶対に避けてください。
- アルミ製の物や塗装されたものには使用しないでください。
- 歯石の除去には適していません。
- 目に入ったときは、すぐに流水で洗い流してください。
- 皮膚に付いたときは、流水でぬめり感がなくなるまで洗い流してください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、絶対に飲んだりしないでください。
- 保管は直射日光の当たらない場所に保管してください。(常温保存)
- 洗浄容器にラバラックムースを入れて長時間放置しないでください。

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は

ミクロの
泡で

わずか
5分

強力洗浄!

義歯洗浄剤

ラバラックムース

歯科医院専売品



家庭用
200mL

大容量
600mL

ミクロの泡が義歯に密着!
はじけて落とす強力洗浄!!

次亜塩素酸Na 30,000ppmで強力除菌!

泡がはじけて菌や汚れを浮かし洗い流す
界面活性剤との相乗効果で化学洗浄!

ノーブラシ&ノータッチで簡単・洗浄!

SD
SUNDENTAL CO.,LTD.

ミクロの
泡で

強力洗浄!

わずか
5分



ミクロの泡が
すみずみまで
義歯に密着

ミクロの泡が義歯に密着!

ミクロの泡がすみずみまで
義歯に密着し洗浄効果を高めます!



before



after

※写真は義歯に洗濯のりを付着・乾燥させ、歯垢染色液を塗布しています。

ノーブラシ&ノータッチ

義歯に触れない簡単・洗浄!

わずらわしいブラッシングもいらず
洗浄容器と義歯を
同時に 洗浄・除菌 するので
義歯消毒の手間が大幅に省けます。

ムースを
かけて水洗い
するだけ

義歯洗浄剤

ラバラックムース

洗浄

除菌

脱臭

ラバラックムースは義歯や補綴物などに付着した
プラーク・タンパク・ヤニ・茶渋・ヌメリなどを
溶解・洗浄・脱臭 するためのムースタイプの洗浄液です。

次亜塩素酸ナトリウムが

30,000ppm配合で強力除菌!

次亜塩素酸Naを30,000ppm配合!

強力な 洗浄・除菌・脱臭 効果を実現!

はじける泡が汚れを浮かす!

泡がはじける際の衝撃

〈キャビテーション現象〉で菌や汚れを浮かし洗い流す
界面活性剤との相乗効果で化学洗浄!

効果的に 洗浄・除菌 できます。

キャビテーション現象とは液体中に圧力変動が生じ、局所的に液体の
蒸気圧が下がることで気泡が発生し、その後崩壊する現象です。
この気泡の生成と崩壊に伴い、非常に高い圧力や温度が発生して周囲
の物質に強い衝撃を与えることが特徴で付着しているゴミを取り払っ
たりすることも可能です。

化学洗浄で
菌を洗い流し
除菌洗浄!

泡のはじける
衝撃で汚れを
浮かします。

ラバラックムースなら〈簡単〉〈短時間〉〈低コスト〉!!

短時間

洗浄時間は約5分

低コスト

大容量 600mL

⇒

1プッシュ = 17.7円

家庭用 200mL

⇒

1プッシュ = 6円