

サムフレンド



Red Checker

レッドチェッカー (歯垢染色液)
“ストロベリー風味”



- モチベーションアップ
- ブラッシングテクニックの獲得
- ブラッシングテクニックの改善
- クリーニング時のプラークチェック

<POINT>

- ◆ 子どもに大人気のストロベリー風味
- ◆ 目立ちやすい色調でプラークの付着部位が明瞭
- ◆ 歯肉があまり染まらずプラークとの識別が容易

<HOW TO>



染色前

染色後

- ① レッドチェッカーを綿棒や綿球に浸し、歯の表面に塗布します。
- ② 染色後、少量の水で軽くすすいでください。
- ③ 染め出されたプラークの付着部位や付着量を確認してください。

歯科
医院用



サムフレンド レッド チェッカー 50ml
患者希望価格：1,000 円(税別)

家庭用

* ホームケア用に患者さんへおすすめください。



サムフレンド レッド チェッカー 5ml
患者希望価格：250 円(税別) 入り数：5 ml × 12 本

<成分>

色素：赤色 104 号・青色 1 号
甘味料：キシリトール・サッカリンナトリウム
香料：ストロベリーエッセンス
保存料：ソルビン酸カリウム
その他：精製水

<食用色素について>

赤色 104 号 (フロキシン)
青色 1 号 (プリリアントブルー)
食品添加物として認可され、多くの食品や化粧品などに使用されている色素です。
また、歯垢染色液は食品として体内に取り込むわけではなく、使用量も微量で十分安全といわれています。