

# SD

SDスーパーポストブラシ

# SUPER POST BRUSH **No.1**

ディスポーザブル根管清掃用ブラシ

確実な接着のために  
根管内の残留物を  
スピーディーに  
除去します

機械的  
根管清掃には  
欠かせない  
ポストブラシ



動画視聴用  
QRコード

根管清掃により  
良い環境を作り  
接着性を高め  
脱離を防ぐ

【入数】

**12本**

【サイズ】

直径：**2mm**  
ブラシ長：**12mm**

【価格】

¥**3,800**〈税別〉

# 確実な接着を実現する第一歩は、根管内の清掃から始まります

○根管内の充填材や仮着材、その他残留物を機械的に掻き出します

○根管内の機械的清掃は接着阻害因子を除去し、接着性を高め、脱離を防止します

テンポラリーセメントやその他残留物を除去することによって、補綴物を継続的に保持し、維持力を高めます。スーパーポストブラシはお手持ちのコントラに装着し、根管内を低速回転で清掃することで、残留物をスピーディーに除去することができます。

## SUPER POST BRUSH の臨床例

【臨床写真ご提供：松本勝利先生】



根管充填終了後の支台築造前



根管形成バーにてポストを  
適正な大きさに形成する



SUPER POST BRUSHのかき上げ  
効果により確実な根管清掃を行う



清掃された根管内を的確に  
ボンディング操作する

### 【使用上の注意】

- ディスポーザブル商品(再使用不可)のため、患者様毎にお取替えてください。
- 熱によりシャंकが変形するため、オートクレーブ等の滅菌はお止めください。
- 800rpm 以上の使用は破損等にて怪我をする恐れがあるため、使用回転数は厳守してください。
- シャंकを確実に奥まで装着し、半チャックではないことを確認してください。
- 口腔外で一度回転させ、振れないことを確認してからご使用ください。
- 回転したまま根管内に挿入すると、破損や怪我をする恐れがあるため、根管内に挿入後、回転させてください。
- 破損、変形等のあるものは、コントラ故障に繋がるため、使用しないでください。
- 本品は使用用途以外には使用しないでください。



1箱  
12本入



【販売名】 SD スーパーポストブラシ

【使用目的】 歯の清掃・研磨及び根管の清掃に用いる回転式歯科用器具

【サイズ】 直径：2mm ブラシ長：12mm

【原材料】 ブラシ部：ナイロン製 コントラ部：プラスチック製

【入数】 12本〈保存用ケース付き〉

【価格】 3,800円(税別)

〈一般医療機器・歯科予防治療用ブラシ〉 製造販売元：株式会社背戸製作所 届出番号：08B3X10007000154

発売元

**SD サンデンタル株式会社**

〈本社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号  
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号  
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

〈福岡営業所〉 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号  
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

サンデンタル ホームページ

<http://www.sundental.jp>

■お問い合わせ・ご用命は