

## 器具器械(68) 印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科用咬合器 10201000

## 隼


## 【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

本品は補綴物を製作するにあたり、作業模型及び対合歯模型を装着する為の器具である。

- ①上顎：アルミ ②下顎：アルミ ③バネ ④高さ調整ネジ：真鍮  
 ⑤マウンティングプレート：樹脂 ⑥インサイザルペン：SUS  
 ⑦スチールプレート：スチール ⑧ネームプレート：アルミ

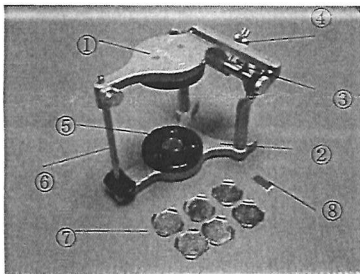

## 【使用目的・効能又は効果】

補綴物を製作時に模型を装着する為の器具。

## 【品目仕様等】

- ・本体寸法：100×160×H115 mm
- ・本体重量：405 g

## 【操作方法又は使用方法等】

- 1 作業模型と対合歯模型を固定する。
- 2 スチールプレートをマウンティングプレート中央のマグネット部分にセットする。
- 3 固定した後、本品下顎部分に石膏を盛りその上に模型を取り付ける。
- 4 同様に上顎部分にも石膏を盛り付け模型を装着する。

## 【使用上の注意】

- 1 注意事項の厳守：器具の正しい使用の為に、注意事項を必ず守ること。
- 2 本品はアルミ材・真鍮材・ステンレスを使用しておりますが鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。

## 3 洗浄、消毒、滅菌上の注意：

- ・本品の洗浄は出来るだけ精製水を使用する事。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
- ・超酸化水(超酸性水)等は金属を腐食させる事があるので使用しないこと。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥してから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆染み等の原因になることがある。
- ・磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止：腐食(錆び)の原因となるので洗浄の際磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。

## 4 取り扱いについて：

- ・取り付けした模型を本品から取り外すときは、本品を直接叩いたりしないでください。破損、変形の原因になります。
- ・石膏等を取り除く際は刃物等を使用しないで下さい。塗装や樹脂が破損する為。
- ・落下等に十分注意すること。破損、変形の原因になります
- ・その他、器具の寿命を著しく低下させるので粗雑な取扱いはしないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・もらい錆を防ぐため錆びている器具と一緒に保管しない事。
- ・また、化学薬品と一緒に収納、保管しない事。
- ・点検時または使用時に本体及びネジ類に劣化や異常を認めた場合は新しい部品と交換すること。
- ・有効期間及び使用の期限：5年

## 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前・使用後の点検：使用前・使用後に破損、ヒビ、キズ及び腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。点検時または使用時に本体及びネジ類に劣化や異常を認めた場合は新しい物と交換すること。

## 【包装】

- ・本体 1 個入り包装
- ・付属品：スチールプレート 6 枚
- ・ネームプレート 1 枚

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者：(有) 秋山歯科器具製作所  
 住所：〒110-0013  
 (緊急連絡先) 東京都台東区入谷2丁目37番2号  
 電話番号：03-3871-6525  
 ファックス：03-3871-6524  
 E-mail：sales@akiyamadent.com  
 製造業者：(有) 秋山歯科器具製作所