

歯06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDN70883000

ハラルドノルディン ブルーレッド咬合紙

【形状・構造及び原理等】※

1. 形状



2. 原理

本材は、赤と青の2色が表裏一体となったカーボン紙で、上顎と下顎の間に入れて軽く咬み合わせることで、シャープで正確なマークを得ることができる。

3. 形状・材質

材質 : カーボン紙
種類 : パーシャル咬合紙 弓状型
フルマウス咬合紙 馬蹄型
厚み : 65 μ

【使用目的又は効果】

使用目的

咬合関係のチェックに使用する。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本材を、上下歯列間に入れて軽く咬合させて咬合採得をする。
- 2) 本材のカーボン紙の色が、咬合面に印記されるので、通法に従って咬合調整を行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 本材は、患者毎に取り換えて使用すること。
- 2) 本材を無理に引っ張ると、破れるおそれがあるので適切に使用すること。
- 3) 本材は色つきのカーボン紙につき、色がつくので衣服や不必要な箇所に付着させない様に取扱うこと。
- 4) 指に色が付着した場合は、必要に応じて速やかに、中性洗剤で手を洗い、他への付着を防ぐこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 3) 室温で、清浄な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : サンデンタル株式会社
製造業者 : HARALD NORDIN SA社
国名 : スイス