

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料 JMDN70881000

ミジィ P. I. P. セット

【禁忌・禁止】^{※1}

本品又はシリコン系印象材に対し過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】^{※1※2}

1 形状



2 組成

ポリジメチルシロキサン、酸化亜鉛 (ペースト)
ポリジメチルシロキサン、精製水 他 (スプレー)
ミネラルオイル 他 (リムーバー)

3 原理

ペーストを塗布した義歯床を数回噛み合わせるにより、不適合箇所の適合状態が確認できる。

【使用目的又は効果】^{※2}

1 使用目的

義歯床と口腔粘膜の不適合部位や圧痛部位の確認

2 効果

義歯床の不適合部位を確認し改善することで、圧痛や違和感の除去ができ、適合性のよい義歯となる。

【使用方法等】^{※1※2}

使用方法

- 1) 練和紙にペーストを必要量出す。
- 2) 診査部位を乾燥させ、ペーストを付属の筆で一方向に薄く塗布する。
- 3) 口腔内が乾燥している場合は、義歯床にスプレー(シリコン乳液)を吹きつけて、水ですすぐ。
- 4) 義歯床を口腔内に装着し、数回噛み合わせた後、取り出す。
- 5) ペーストが薄くなっている箇所を削除する。
- 6) 適合性が改善されるまで、2)~5)の工程を繰り返す。
- 7) 診査後、義歯床に付着しているペーストは、リムーバーを使用し拭き取る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用後の筆は、リムーバー等でペーストをきれいに落とし、水洗後、アルコール消毒を行うこと。患者毎に清潔な筆を使用すること。

【使用上の注意】^{※1}

- 1) 使用の際は専用の練和紙と筆を使用すること。
- 2) 排気装置を備えた環境で研磨作業を行うこと。
- 3) 本文【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】^{※1※2}

保管方法

- 1) 使用後は、しっかりとフタを締めること。
- 2) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 3) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)及び、落下の危険や傾斜のない安定した場所に保管すること。
- 4) 液状のスプレーやリムーバーは液もれを起こすことがあるので必ず立てて保管すること。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 6) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】^{※2}

製造販売業者: サンデンタル株式会社
製造業者: Keystone Industries
国名: アメリカ合衆国