

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN31776000

SDパラミラー

【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】



[種類] SDパラミラー

【原材料】

ミラー部：ステンレススチール
柄部：アルミ合金

【使用目的又は効果】

- ブリッジ作製時の支台歯間の平行測定に用いる器具である。
- ミラー部に赤と黒のラインを5mm間隔で交互に入れているので、支台歯を平行線上にわかりやすく映し出すことができる。
- 支台歯間の平行性を測定することにより、歯質の削除量を最小限にとどめるとともに、多数歯を平行に形成することができる。

【使用方法等】

本品は、ブリッジ作製時の支台歯間の平行測定に使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ミラーの曇りを防ぐ為に、37℃前後に温めるか、歯科用の「ミラーの曇り止め」に浸け、乾燥させ使用すること。

【使用上の注意】

- ①使用目的以外は使用しないこと。
- ②使用前に必ず、洗浄・滅菌[保守・点検に係る事項参照]をすること。
- ③器具に付着している血液・体液・組織および薬品等は、乾燥する前に洗浄液等に浸し除去すること。
- ④本品はステンレス・アルミ合金製品である。エタノール・グルコン酸・クロルヘキシジン・塩化ベンザルコニウム液等の薬液中に長時間浸漬しないこと。
- ⑤強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤等は、器具を変色・腐食させる恐れがあるので使用を避けること。また、金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは器具の表面を損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑥破折・曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の応力を加えないこと。
- ⑦洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄するときには、洗浄物どうしが接触して破損することがないように注意すること。
- ⑧アレルギーが認められる方には使用しないこと。
- ⑨本品は、患者毎に取り換えて使用すること。
- ⑩本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- 本品は、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びる恐れがあるため、湿度が低く清潔な場所に保管すること。
- 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に適切に保管・管理すること。

[有効期間等]

- 本品は使用有効期限を特別定めていないため長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することが有るため適時新しい物と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用（滅菌）前・使用後に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか点検すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【包装】

- 1本入包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 背戸製作所
住 所：茨城県つくば市杉木 283-1
電 話 番 号：029-867-0376
F A X：029-867-0439
製 造 業 者：株式会社 背戸製作所

【販売業者の氏名又は名称等】

販 売 業 者：サンデンタル株式会社
住 所：〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9
電 話 番 号：06-6245-0950
F A X 番 号：06-6245-7690