

## ハトー アストロブラシ

### 【形状・構造及び原理等】※

形状:



#9 100(ハトー アストロブラシ ソフト)



#9 114(ハトー アストロブラシ ミディアム)

毛の材質: #9 100 山羊毛  
#9 114 馬毛

仕様

軸部形式:φ2.34mm HP用  
軸部の長さ:スタンダード

### 【使用目的又は効果】※

1. 使用目的  
歯科補綴物等の研磨に用いる
2. 効果  
レジン・ポーセレン・スルホン、そして貴金属から硬質メタルにいたる広域な材料に対しての仕上げの研磨が出来る。

### 【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、表示回転数で回転させて、歯科用研磨材を塗りながらソフトタッチで断続的に被研磨物に押し当てて研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) メーカーの指示に従って、シャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、振れがないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

使用注意

- 1) 表示回転数を超えた過度の使用はしないこと。
- 2) 変形、損傷(錆び、曲がり、表面キズ、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用する際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。

- 4) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 排気装置を備えた環境で作業をすること。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は、高温・多湿及び、直射日光や水のかかる恐れのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は、室温で、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない場所に保管すること。
- 3) 本材は、腐食性のある化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売元及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: サンデンタル株式会社

製造元: HATHO GmbH

国 名: ドイツ連邦共和国