


## EVE ダイヤプロ

## 【形状・構造及び原理等】

1. 形状\*\*
2. 本品には、作業部の粒度2種類〔ミディアム（中目）、ファイン（細目）〕、形状HP用3種類CA用2種類がある。

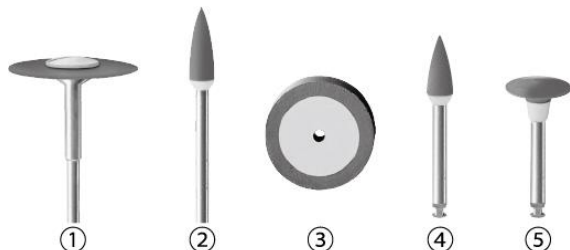

- 1) 軸部の規格：ISO1797-1  
軸部形式1：CA用  
軸部形式4：HP用

- 2) 作業部の規格 (mm)：

番号	サイズ	粒度	
		ミディアム	ファイン
①	径 20x 長 1	SL20DPmf	
②	径 4x 長 13	H2DPmf	H2DP
③	径 17 x 長 2.5	R17DPmf	R17DP
④	径 4x 長 10	W16DPmf	W16DP
⑤	径 10x 長 2.5	W18DPmf	W18DP

## 3. 組成

- 1) 軸部：ステンレス鋼
- 2) 作業部：ポリウレタン、ダイヤモンド砥粒

## 4. 原理

配合の研削材により被研磨物を研磨する。

## 【使用目的又は効果】\*

ポリウレタンで結合されたダイヤモンド砥粒を研磨成分とする歯科用研削材。ニケイ酸リチウムガラスセラミック・ポーセレン・ジルコニアの仕上研磨、最終仕上研磨などに用いる。

## 【使用方法等】\*

## 使用方法

- 1) 本品を口腔内で使用する際は滅菌する。
- 2) 本品を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び歯科技工用高速レーズ等に取り付ける。
- 3) 被研磨物に作業部をあて回転させ、ソフトタッチで研磨する。

## 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 再利用する際には必要に応じ、清掃液・消毒剤を用いて付着物を除去後、オートクレーブ滅菌もしくは薬液による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）や塩化ベンザルコニウム溶液、ブラズマ滅菌は、錆の発生や接着剤が劣化し作業部が脱落する可能性があるため使用しないこと。また、清掃液・消毒剤・滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。
- 2) メーカーの指示に従って、シャンクをしっかりと奥まで入れてチャックを締めていることを確認する。

- 3) 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 破折の原因となる無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 5) ソフトタッチで使用すること。
- 6) 目詰りや形状の微調整には「EVE ドレッシングツール AS10」を使用すること。

## 【使用上の注意】

- 1) 指定（製品の被包に記載）の回転数を超えて使用しないこと。
- |       |                 |
|-------|-----------------|
| 推奨回転数 | 7,000~12,000rpm |
| 最大回転数 | 20,000rpm       |
- 2) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
  - 3) 使用時は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
  - 4) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - 5) 排気装置を備えた環境で作業すること。
  - 6) 表示使用回転数を超えた使用は、本材が破折してけがをする恐れがあるので、過度の回転数で使用しないこと。
  - 7) 無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 本材は室温で、外圧（物理的負荷）を受けない場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、塩分やイオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社  
製造業者：EVE ERNST VETTER GMBH  
国 名：ドイツ連邦共和国