

ハトーポリスター ポリッシング クリーム

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び成分

品名・容量	形状	成分
ハトーポリスター ポリッシング クリーム 90g	ペースト	水 二酸化ケイ素 オレイン酸



2. 原理

擦ることにより、被研磨物を研磨する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

補綴物等の研磨に用いる器材。

2. 効果

- 1) 本材は、下記適応材料の光沢研磨が簡単にできるペースト状艶出し材である。中研磨後の研磨面を均し、研磨キズを最小にし、次段階（最終光沢研磨）での光沢が素早く出るように準備する。
- 2) 適応材料：アクリル樹脂、軟性レジン、コンポジットレジン、貴金属
- 3) 推奨ブラシ：

ブラシ種類	ハトー製ブラシ
布バフ	● ハトーミラバフ等
綿糸バフ	● ハトーブラシ（レーズ用）L25、L26、L27等 ● ハトーブラシ（HP用）W-1、W-6等
フェルト	● ハトーブラシ（レーズ用）ハトージャンボホイール J2-1/J2-2 ● ハトーブラシ（HP用）W-4等
モスリン フランネル	● ハトーブラシ（レーズ用）ハトージャンボホイール J1-1/J1-2 ● ハトーブラシ（HP用）W-2等 ● ハトーブラシ（HP用）W-3等
マイクロファイバーレザ	● ハトーブラシ（レーズ用）L23 ● ハトーブラシ（HP用）W-7等
ZETAコットン （裂けてもそれ以上は裂けないコットンディスクの代用品）	● ハトーブラシ（レーズ用）L28
COSIMAソフト （コットンに薄くシリコンをコートしたコットンディスク）	● ハトーブラシ（レーズ用）L32

【使用方法等】

使用方法

- 1) 通法通りの中研磨を終えた後、ハトーポリスター ポリッシング クリームを約1cm、研磨対象面に塗布する（研磨

面積によって塗布量を調節すること）。

- 2) 全部床義歯の場合は、ハトーブラシ（レーズ用）L32 869 100/14（ハトー社製別売品）で研磨する。
- 3) 狭い箇所はマイクロモーター等を使用し、HP用コットンディスク（ハトー社製別売品）で研磨する。
- 4) 使用する綿糸バフは、表示使用回転数に設定し、軽い圧力で作業を行うこと。
- 5) ハトー社専用のブラシ・バフ等及び、ポリッシングペーストを併用することにより、キズのないハイグロスで光沢のある、審美を極めた最終仕上げを短時間で行うことができる。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本材は、口腔内で使用しないこと。
- ② 使用前に使用するブラシなどの予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 使用するブラシ等は、表示回転数を厳守し、軽い圧力で作業を行い、過度に圧力をかけないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本材の使用により、発疹・皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し医師の診断を受けること。
- 2) 作業の際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
- 3) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 排気装置を備えた環境で作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 本材は、室温で保管すること。
- 2) 高温、多湿及びホコリや直射日光のあたるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、塩分、イオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 最適な研磨結果を得る為に、本材に使用したブラシ類は他の研磨材が付着しないよう、区別して個別に使用すること。
- 5) 本材の使用後、キャップをしっかりと締めて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社
 製造業者：HATHO GmbH
 国 名：ドイツ連邦共和国