

ハトーポリスター プロ ポリッシングペースト

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び成分

品名・容量	形状	成分
ハトーポリスター プロ ポリッシング ペースト オレンジ 150g	固形	酸化アルミニウム パラフィン ポリオキシエチレンステアリン酸 エステル オレンジ油
ハトーポリスター プロ ポリッシング ペースト ブルー 150g	固形	酸化アルミニウム パラフィン ポリオキシエチレンステアリン酸 エステル グンジョウ
ハトーポリスター プロ ポリッシング ペースト ピンク 150g	固形	酸化アルミニウム パラフィン ポリオキシエチレンステアリン酸 エステル 酸化チタン



2. 原理

擦ることにより、被研磨物を研磨する。

【使用目的又は効果】[※]

1. 使用目的

補綴物等の研磨に用いる材料。

2. 効果

本材は、下記歯科補綴物の最終光沢研磨用艶出し材である。補綴物表面のキズをなくし、ハイグロスで光沢のある最終仕上げ研磨を行うことができる。

下記補綴物の最終光沢研磨に使用

種類	用途
オレンジ	金合金
ブルー	コバルトクロム合金、チタン合金、ノンプレシヤスメタル
ピンク	コンポジットレジン

【使用方法等】[※]

使用方法

1) 通法通りの仕上げ研磨を終えた後、回転させたバフなどに

ポリッシングペーストを約2秒間押し付け、ブラシに付着させる。

- 2) 全部床義歯の場合は、レーズ用綿糸バフ（ハトー社製別売品）で研磨する。
- 3) 狭い箇所はマイクロモーター等を使用し、HP用コットンバフ（ハトー社製別売品）で研磨する。
- 4) 使用する綿糸バフは、表示使用回転数に設定し、軽い圧力で作業を行うこと。
- 5) ハトー社専用のブラシ・バフ等及び、ポリッシングペーストを併用することにより、キズのないハイグロスで光沢のある、審美を極めた最終仕上げを短時間で行うことができる。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本材は、口腔内で使用しないこと。
- ② 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ④ 使用するブラシ等は、表示回転数を厳守し、軽い圧力で作業を行い、過度に圧力をかけないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本材の使用により、発疹・皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し医師の診断を受けること。
- 2) 作業の際は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネ等を使用すること。
- 3) 公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 4) 排気装置を備えた環境で作業を行うこと。
- 5) 本材は、本文【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】[※]

保管方法

- 1) 本材は、室温で保管すること。
- 2) 高温、多湿及びホコリや直射日光のあたるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、塩分、イオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 最適な研磨結果を得る為に、本材に使用したブラシ類は他の研磨材が付着しないよう、区別して個別に使用すること。
- 5) 本材の使用後、他の艶出し材などと接触させずに保管すること。
- 6) 本材は、歯科の医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】[※]

製造販売業者：サンデンタル株式会社
製造業者：HATHO GmbH
国 名：ドイツ連邦共和国