

器 65 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000（歯科用貼薬針 70679000）

再使用禁止

mA x ルートチップ

【禁忌・禁止、併用禁忌】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



ブルー



クリア

2. 原理

本品は、口腔内で使用するロック式（ルアーロック式）シリンジに接合する合成樹脂製のチップで、歯科用接着充填材料及び歯科用根管充填材料等の適用、歯科用薬剤の貼薬等に使用する。

3. 仕様

材質：ポリプロピレン・青色 404 号（ブルーのみ）
 色調：ブルー：濃い青色 クリア：半透明
 チップ先端の外径：0.5±0.1 mm
 チップ先端の内径：0.3±0.1 mm

【使用目的又は効果】

口腔内における充填材料及び修復材料の適用、歯科用薬剤等の貼薬等に使用する。

【使用方法等】

口腔内で使用するルアーロック式のシリンジ等に取り付け充填材料、修復材料、歯科用薬剤等の充填を行う。

【使用方法に関する使用上の注意】

1. ロック式でないシリンジ及びロック部分が適合しないシリンジには使用しないこと。
2. 接合部にゆるみがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
3. 使用に際しては、本品は未滅菌なので、ガス滅菌又は、消毒用エタノール等で清拭・消毒してから使用すること。
4. 本品に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないことを確認してから使用すること。
5. 使用に際しては、長時間、光が当たらないように注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2. 本品を【使用目的又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。
3. オートクレーブ滅菌を行うと、形状が変化するので行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、直射日光のあたる場所、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。（本品が劣化するため）
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社
 製造業者：塩城市塩都区林海橡塑制品厂
 製造所国名：中華人民共和国