

医療用品04 整形用品
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 JMDN38609000

再使用禁止


コニカルスクリューポスト

【禁忌・禁止】

- 1 根管が破損する恐れがありますので、決してポストは根管内に無理な力でねじ込まないこと。
- 2 ポストを短くしたり、改ざんしないこと。金メッキが剥がれることにより腐食する恐れがあるので、そのようなポストは決して使用しないこと。
- 3 本ポスト又は類似成分合釘に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の往來歴のある患者には使用しないこと。
- 4 コニカルスクリューポストは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1 形状:

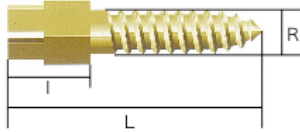

2 原理

レジンやアマルガムでの支台築造や、コンポジットレジンでの修復時に、本材のポストを支柱として植立し、併用する事で、保持・維持力を補強する。

3 仕様

材質:

原材料		割合
真鍮	銅	63.3%
	ニッケル	0.01%
	亜鉛	36.69%

サイズ表

単位 mm

種類		R	L	I
ショートタイプ	S1	1.05mm	8mm	3mm
	S2	1.20mm	8mm	3mm
	S3	1.35mm	8mm	3mm
	S4	1.50mm	8mm	3mm
	S5	1.65mm	8mm	3mm
	S6	1.80mm	8mm	3mm
ミディアムタイプ	M1	1.05mm	9.5mm	3mm
	M2	1.20mm	9.5mm	3mm
	M3	1.35mm	9.5mm	3mm
	M4	1.50mm	9.5mm	3mm
	M5	1.65mm	9.5mm	3mm
	M6	1.80mm	9.5mm	3mm
ロングタイプ	L1	1.05mm	12mm	3mm
	L2	1.20mm	12mm	3mm
	L3	1.35mm	12mm	3mm
	L4	1.50mm	12mm	3mm
	L5	1.65mm	12mm	3mm
	L6	1.80mm	12mm	3mm
エクストラロングタイプ	XL4	1.50mm	14mm	3mm
	XL6	1.80mm	14mm	3mm

【使用目的又は効果】*

歯科修復物、補綴物等の維持又は補強に用いること。

【使用方法等】*

1 使用方法

注意:本ポストのサイズに適合したリーマを使用すること。根管はリーマにより望みの深さまで拡大させること。リーマは上下にのみ動かすこと。

- 1) ウ蝕された歯牙の歯髄を完全に治療すること。
- 2) スクリューポストを植立する深さだけ、必要に応じて使用するスクリューポストのサイズに適合したリーマを選択し、更に根管を拡大する。(一般的に歯根長の2/3が指標とされている。)リーマは上下にだけ動かし作業する事。回転させながら作業しないこと。
- 3) 専用キーを使用し、根管の長さを確認しながらねじ込むこと。ポストのねじ込みが済んだら、一度ポストを取り外すこと。
- 4) 根管とスクリューポストの洗浄・乾燥した後、スクリューポストをセメントの中に浸し、再度根管にねじ込む。

2 洗浄方法

- 洗浄は精製水を用いて超音波洗浄を行うこと。
- 滅菌は、消毒用アルコールに10分間浸漬にて行うこと。その後、滅菌済精製水で消毒用アルコールを十分洗い流すことを推奨する。
- 消毒用アルコール以外の薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、本材に影響を及ぼすことがある。また、その際には滅菌済精製水で、薬剤を十分に洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】*

保管方法

- 1) 高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) 室温で、清潔な場所に保管すること。4) 歯科の医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

保守点検

使用前に損傷、変形等(錆、変色、キズ、曲り、汚損)がないかを確認し、該当するものがあれば使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者:サンデンタル株式会社

製造業者:HARALD NORIDIN S.A.(ハラルドノルディン社)

国名:スイス連邦