



回転・引き上げ・引き回しの操作を確実にを行うことにより、スケーリングと搔爬が同時に行えます。

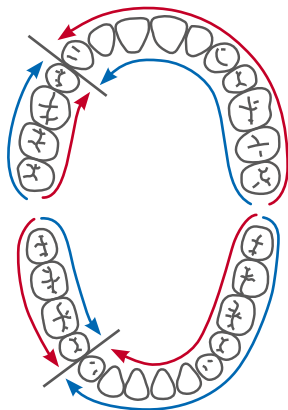

● 部位に使用する刃部

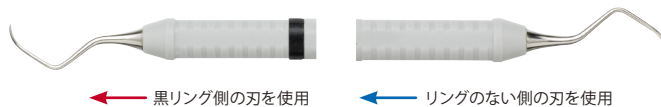

← 黒リング側の刃を使用

← リングのない側の刃を使用

テクニカルポイント

1. 片方の刃で連続して搔爬とスケーリングを同時に行う。
2. 基本的操作を確実に習得する。(回転-引き上げ-引き回し)
3. 親指・人差し指・中指の3本で執筆状に持ち、薬指を固定指とする。
4. 固定指の位置を習得する。
5. スタートは必ず遠心から行い、正中方向へ操作する。