

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料 JMDN70881000

ミジィ P.I.P. パースト

【禁忌・禁止】

本品又はシリコン系印象材に対し過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】※※

1 形状

白色の軟膏が容器(ジャー式、ポンプ式、チューブ式)に充填されている。



2 容量

| | |
|-------|--------|
| ジャー式 | 36g |
| ポンプ式 | 113.5g |
| チューブ式 | 29g |

3 組成

ジメチルポリシロキサン、酸化亜鉛

4 性状

白色の軟膏で、わずかに特異なおいがある。

5 原理

本品を義歯床に塗布し、数回咬み合わせるにより、不適合箇所を見つけることができる。その部分を削除していくことで適合性の良い義歯ができる。

【使用目的又は効果】

1 使用目的

義歯床と口腔粘膜の不適合部位や圧痛部位の確認

2 効果

義歯床の不適合部位を確認し改善することで、圧痛や違和感の除去ができ、適合性のよい義歯となる。

【使用方法等】

1 使用方法

- 1) 義歯床の表面をよく乾燥させ、本品を付属品の筆を用い一定方向に薄く塗布する。
- 2) 口腔内が乾燥している場合は、P.I.P.スプレー(シリコン乳液)を口腔内に吹き付けて、軽く水で口をすすがせる。
- 3) 本品を塗布した義歯床に、P.I.P.スプレーを全体に吹き付ける。スプレーをすることにより、口腔内に本品が付着せず、又義歯床の異常位を確認しやすくなる。
- 4) 義歯床を口腔内に装着し、口を閉じ軽く押さえる。
- 5) 義歯床を慎重に外し、本品の剥げた部分を削除する。
- 6) 圧痛又は違和感がなくなるまで、1)～5)の工程を繰り返す。
- 7) 義歯床に付着している本品は、P.I.P.リムーバーを染み込ませたティッシュペーパー等できれいに拭き取る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用後の筆は、リムーバー等でペーストをきれいに落とし、水洗後、アルコール消毒を行うこと。患者毎に清潔な筆を使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用の際は専用の練和紙と筆を使用すること。
- 2) 排気装置を備えた環境で研磨作業を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】※

1 保管方法

- 1) 本品使用後は、しっかりとフタを締めること。
- 2) 本品は直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2 有効期間 5年(外箱に記載)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンデンタル株式会社

製造業者: Keystone Industries

国 名: アメリカ合衆国