

再使用禁止


# mAx ガッタパーチャポイント

## 【禁忌・禁止】

1. 天然ゴムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. mAx ガッタパーチャポイントは再使用禁止。

## 【形状・構造及び原理等】

形状: 一定のテーパーを用いる針状  
メインポイント形態図

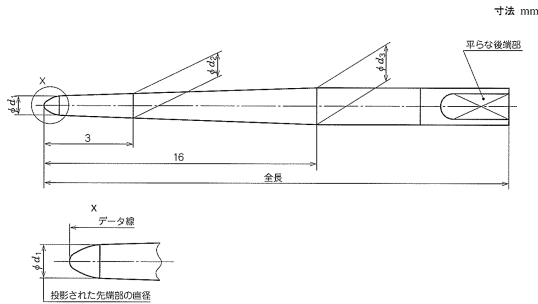

成分: 酸化亜鉛、トランスポリイソブレンゴム、リトボン、硫酸バリウム、顔料

サイズ: mAx ガッタパーチャポイント メインポイント 単位 mm

表示番号	直径d1	直径d2	直径d3	全長	色
#25	0.25	0.31	0.57	30	赤
#30	0.30	0.36	0.62	30	青
#35	0.35	0.41	0.67	30	緑
#40	0.40	0.46	0.72	30	黒
#45	0.45	0.51	0.77	30	白
#50	0.50	0.56	0.82	30	黄
#55	0.55	0.61	0.87	30	赤
#60	0.60	0.66	0.92	30	青
#70	0.70	0.76	1.02	30	緑
#80	0.80	0.86	1.12	30	黒
#90	0.90	0.96	1.22	30	白
#100	1.00	1.06	1.32	30	黄
#110	1.10	1.16	1.42	30	赤
#120	1.20	1.26	1.52	30	青
#130	1.30	1.36	1.62	30	緑
#140	1.40	1.46	1.72	30	黒

形状: 一定のテーパーを用いる針状


誤差: 長さ±2mm、直径±0.05mm(#25)、  
直径±0.07mm(#30~#140)、

d1 : 先端の仮想直径

d2 : 先端から3mmの直径

d3 : 先端から16mmの直径

アクセサリーポイント形態図

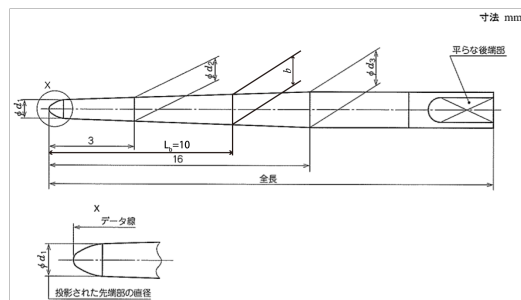

サイズ: mAx ガッタパーチャポイント アクセサリーポイント 単位 mm

品名	d1	d2	d3	b	全長	テーパー
大	0.26	0.39	0.98	—	22.5	0.045
中	0.27	0.40	0.86	—	18.5	0.035
小	0.30	0.43	—	0.84	12.5	0.059
太大	0.27	0.40	1.19	—	22.5	0.061
太中	0.26	0.39	1.085	—	18.5	0.053
太小	0.36	0.49	—	0.96	12.5	0.067
細大	0.21	0.34	0.79	—	22.5	0.035
細中	0.16	0.29	0.68	—	18.5	0.030
細小	0.16	0.29	—	0.59	12.5	0.043

形状: 一定のテーパーを用いる針状  
誤差: 長さ±1mm、直径±0.03mm

## 【使用目的又は効果】\*

歯の根管の充填に用いる。

## 【使用方法等】\*

### 使用方法

- 1) 適切に拡大・形成・消毒された根管を清潔にし、乾燥する。
- 2) 形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択する。
- 3) メインポイントに根管充填材をつけ、メインポイントを形成された根管の先端まで差し込む。
- 4) メインポイントと根管壁の間にアクセサリーポイント等を挿入し、プラグー、スプレダーなどのインストゥルメントを用いて側方に圧接や垂直加圧し、空隙を緊密に封鎖する。
- 5) 完全に根管を封鎖するまで、4)の操作を繰り返す。
- 6) 加熱したインストゥルメント又はヒートカッターを用いて、ポイントを根管口で切断し、プラグーで垂直加圧し、根管を完全に封鎖する。

## 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) メインポイント・アクセサリーポイントは未滅菌につき、ポイントを使用する前に必ず消毒用アルコールで消毒すること。
- 2) 高圧滅菌や乾熱滅菌を行わないこと。
- 3) 正しく根管封鎖するために、ポイントの選定は慎重に行うこと。

## 【使用上の注意】\*

### (重要な基本的注意)

- 1) 天然ゴム・ガッタパーチャに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により発疹などの過敏症を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 3) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本材を使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】\*

### 1. 保管方法

- 1) 本品はフタを締め、高温、多湿及び直射日光や水のかかるおそれのない場所に保管すること。
- 2) 本品は室温で、外圧(物理的負荷)を受けず、落下のおそれのない清潔な場所に保管すること。
- 3) 本品は、化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 本品は、歯科の医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 2. 使用期限

製品記載の使用期限までに使用すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者: サンデンタル株式会社

製造業者: CANDIAN Dental Material Technology (Shanghai) Co., Ltd.

国名: 中華人民共和国