

# ラバラック D

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液  
歯科医院 / 歯科技工所専用

義歯ブラシによる**手洗い一切不要 !!**  
超音波洗浄器でカンタン、手間いらず！

## ラバラックD サンクスセール

キャンペーン期間:2020年4月1日(水)~2020年5月20日(水)

次亜塩素酸ナトリウム2%で強力洗浄！  
超音波洗浄器との併用で洗浄がラク！



+



=

専用容器L  
無料

ラバラックD サンクスセール  
ニュー洗浄セット  
ラバラックD 1.2L ¥4,500+  
専用容器L ¥800  
**¥4,500**



+



=


特別  
価格

ラバラックD サンクスセール  
5L(2個パック)  
通常価格 ¥27,000  
**¥22,500**




### STEP 1

義歯や補綴物を専用容器で受け取ります。

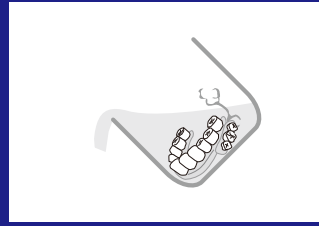


### STEP 4

汚れが落ちているか確認をして、ラバラックDの廃液を捨てます。

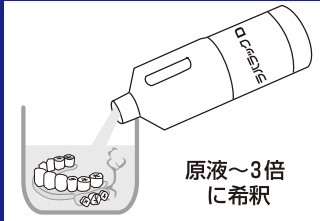

### STEP 2

汚れに応じて原液～3倍に希釈したラバラックDで洗浄物を浸します。

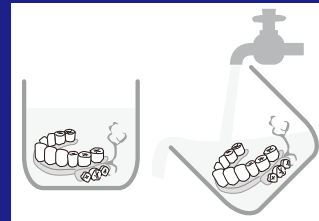

### STEP 5

水を入れて1～2回すすいでください。



### STEP 3

5～10分間超音波洗浄をします。



### STEP 6

専用容器に新しい水を入れて、5分間程、超音波洗浄をします。塩素臭とぬめりを取り除くために必ず実行してください。

**注** 金属部分に次亜塩素酸が残留したまま放置すると、金属腐食の原因にもなります。

## 発注書

お取引先販売店様にご用命頂くか、下記内容をご記入の上 FAX.