



歯科用

メガネの 除菌クリーナー

メガネの
新習慣

双眼ルーペ・保護メガネなどの除菌&洗浄

塩化ベンゼトニウム配合

アルコールフリー

液性：中性




お手頃サイズの
スプレーボトル

スプレーボトル
300mL
〈レギュラーサイズ〉

〈価格〉
1,500円
(税込 1,650円)

スプレーして流水洗浄…
カンタン除菌&洗浄!!
アルコールフリー&中性でメガネレンズ・フレームを
傷めず、やさしく汚れを除去します。

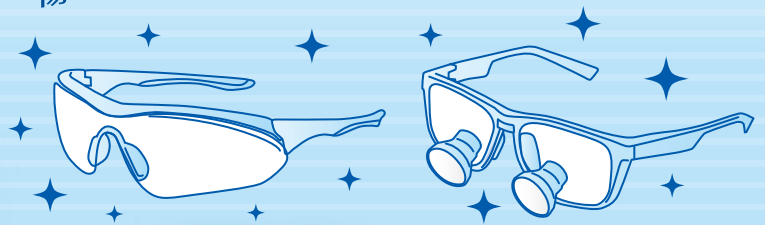

【お得用】
2L
〈ラージサイズ〉

つかえ用
スプレーボトル付

〈価格〉
6,000円
(税込 6,600円)


減容タイプ容器は使用後折りたたんで
廃棄でき、ゴミ削減が可能です。

SDメガネの除菌クリーナー

歯科用 双眼ルーペ・保護メガネなどの除菌・洗浄に!!

SDメガネの除菌クリーナーの使用方法


*使用上の注意をしっかりと読んでお使いください。

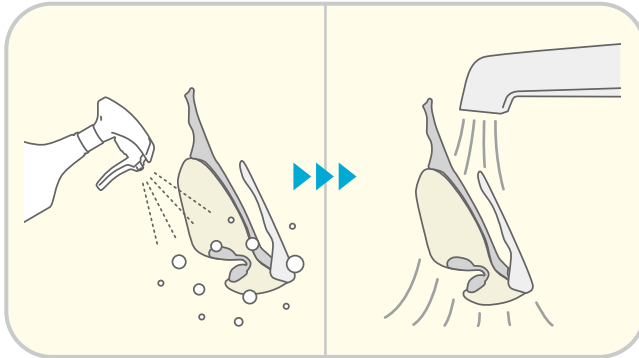

ユニバット双眼ルーペ・保護メガネ等

水洗できるもの

- ①メガネに本洗浄剤を直接噴霧してください。
- ②流水でじゅうぶんにすすいでください。
- ③やわらかい布等で、水分を拭き取ってご使用ください。

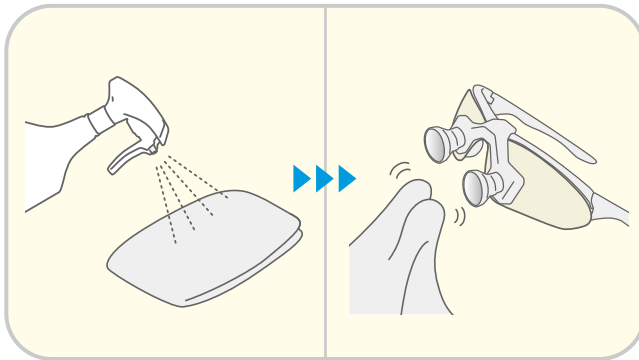

双眼ルーペ等

水洗できないもの

- ①本洗浄剤を浸み込ませた布等で、汚れを拭き取ってください。
- ②やわらかい布等で、しっかりと洗浄剤を拭き取ってご使用ください。

【使用上の注意】 ●取扱い後は手、顔等をよく洗うがいをすること。 ●皮膚への影響があるため、医療用グローブを着用すること。また、眼に入らないように保護メガネ等を着用すること。その他防護具の着用をすること。 ●密栓し、直射日光の当たらない場所に施設して保管すること。 ●幼児の手の届かないところに保管すること。 ●ほかの洗浄剤等と混合して使用しないこと。 ●用途以外に使用しないこと。 ●本洗浄剤の液だれや液の飛び跳ねを放置すると結晶が発生するおそれがあるため、洗浄剤が付着した箇所はじゅうぶんに水で洗い流すこと。 ●容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出すおそれがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかりと締める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付くおそれがある。

【警告】 ○軽度の皮膚刺激

※洗浄成分の性質上、温度変化により液が白濁する場合がありますが、性能には影響ありません。

SDメガネの除菌クリーナー

【用途】	歯科用双眼ルーペ・保護メガネなどの除菌・洗浄
【液性】	中性
【成分】	塩化ベンゼトニウム・陰イオン系界面活性剤・他
【容量】	2L(ラージサイズ)、300mL(レギュラーサイズ)

価格	(レギュラーサイズ) 1,500 円(税込 1,650円)
	(ラージサイズ) 6,000 円(税込 6,600円)

発売元

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

■お問い合わせ・ご用命は

サンデンタルホームページ <http://www.sundental.jp>

※掲載商品の価格は小売価格で2023年9月現在のものです。仕様及び外観は、製品改良の為、予告なく変更することがあります。