

構図 × 効率を考えた新設計口角鉤

Photo Guider.

フォトガイダー



「フォトガイダー」外形と垂直・水平ラインが
適正な規格写真に導きます！

- ▶ 装着基準の院内共有がカンタン！
- ▶ どんなカメラでも撮影角度にブレが生じにくい！
- ▶ 規格撮影は所見説明・経過説明に伝達力抜群！
- ▶ 大人にも子供にも使用可能！

Photo Guider. A

正面観撮影用
【二対で使用】

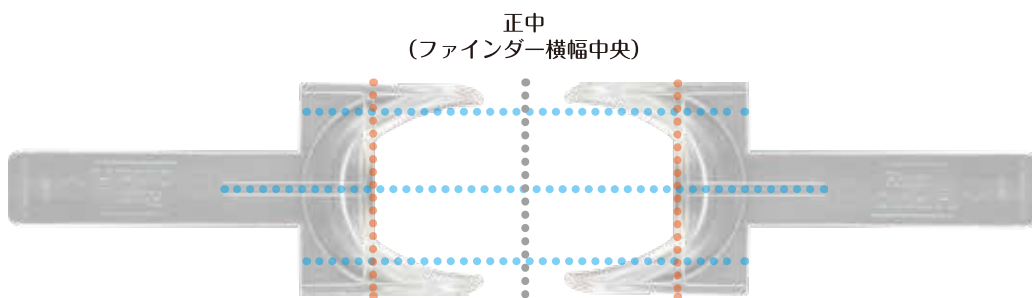


Photo Guider. A

Photo Guider. C

側方面観撮影用
【撮影しない側で使用】

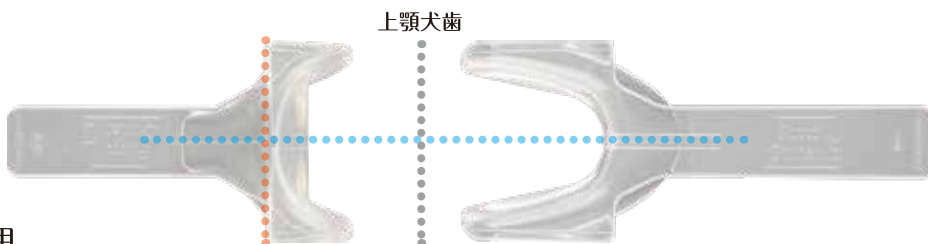


Photo Guider. B

側方面観撮影用
【撮影側で使用】

フォトガイダー使用で撮影する際のポイント
フォトガイダー外形で囲まれた四角の面と、撮影する際のファインダー（四角の面）を平行に位置させることが適正な撮影に繋がります。

正面観撮影のヒント 【正面観撮影は A 型を 2 個使用】
口角装着後の引き加減は、正中から左右の垂直ライン（オレンジ色点線）の距離が均等になるように引きます。

側方面撮影のヒント 【側方面観撮影は B 型、非撮影側は C 型使用】
左右引く力の合計を「10」とすると、B 型は「8」C 型は「2」程度で軽く添えます。

水平ライン（水色点線）は、瞳孔線（又はフランクフルト平面）と平行関係を保ち、咬合平面前方が写真縦幅中央に位置するように装着します。



口腔粘膜側の形状

側方面観撮影
イメージ



正面観撮影
イメージ



※実際の撮影ポジションは商品同封の使用説明書をご参照ください。

使用例 [成人]



写真提供 清野 政孝 先生

商品詳細	フォトガイダー A	フォトガイダー B	フォトガイダー C	価格
フォトガイダーフルセット	2	1	1	¥8,640
フォトガイダー正面観用	2	—	—	¥4,800
フォトガイダー側方面観用	—	1	1	¥4,800

注意：写真のトリミングは推奨されないこともありますが、記録整理等で行う際は、フォトガイダー外形を含めて撮影を行い、写真の縦横比率 [上部イメージ写真内黄色線] に配慮しながらトリミングすると、整った構図が得られます。


頬側面用：側方面観撮影に特化した口腔内撮影用ミラー
エバポーレイテッドミラー『カスタムSモデル』

¥22,500



製品詳細

1. 口腔粘膜に配慮した2つの形状を1つのミラーに付与
2. ミラー中央部のくぼみ (凹み部) は、ミラー保持に大変有効です。構図維持がしやすく手際の良い撮影につながります。

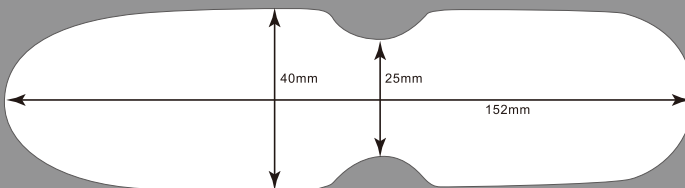

●掲載商品の価格は小売価格で、2024年4月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。◎販売名：フォトガイダー 届出番号：13B3X00243000034 ●製造販売元：有限会社秋山歯科器具製作所 ●販売元：サンデンタル株式会社 ◎販売名：エバポーレイテッドミラー 届出番号：27B2X00041000004 ●製造販売元：サンデンタル株式会社

