



## EVE ダイヤセラ ポリッシャーセット 2 新発売記念セール

2022.12.12(月)～2023.1.31(火)

期間中、特別価格にてご提供いたします

簡単!! 3ステップ

ジルコニア・酸化アルミニウム等の形態修正から最終光沢研磨までを  
チェアサイドで行えるキットです [コントラアングル]。

ステップ1  
ダイヤセント  
プラスコース

ステップ2  
ダイヤセラ  
ミディアム

ステップ3  
ダイヤセラ  
ファイン



EVE ダイヤセラ ポリッシャーセット 2 CA用  
DYP-W9g, DYP-W13g, W16DCmf  
W17DCmf, W18DCmf, W16DC  
W17DC, W18DC 各1入

キット価格 ¥9,280 ➤ **セール特別価格**

## EVE ダイヤセント プラス

ジルコニア・酸化アルミニウムなどの形態修正

- ジルコニア・酸化アルミニウム・セラミック・メタルなどの形態修正  
高硬度の材料でも発熱が少なく、口腔内での形態修正が可能。形態修正後の状態が良い！
- カーボランダムに比べキメが細かいので研削後の状態が良く、研磨工程の作業短縮が可能

### 推奨研磨材料

ジルコニア  
酸化アルミニウム  
セラミック  
メタル

ステップ1  
ダイヤセント  
プラス コース  
形態修正



### 推奨回転数

8,000~  
12,000rpm

アイテム No.	DYP-W9g	DYP-W13g
研磨部寸法 [mm]	11.5×3	4×10
価格 [税抜]	¥2,000	¥1,500



### EVE ダイヤセントプラス、EVE ダイアセラ共通のヒント

1. 注水下で使用すると、より熱の発生を抑え材料の摩耗を抑える
2. 回転速度は推奨回転数範囲内で使用すること  
高回転（12,000rpm 以上）で使用すると異常摩耗や発熱の原因になる

## EVE ダイアセラ

ジルコニア・酸化アルミニウム等の光沢研磨→最終光沢研磨

ステップ2  
ダイヤセラ  
ミディアム  
微調整・光沢研磨



ステップ3  
ダイヤセラ  
ファイン  
最終光沢研磨



### 推奨研磨材料

ジルコニア  
酸化アルミニウム

### 推奨回転数

7,000~  
12,000rpm

価格 [税抜] ¥1,350

アイテム No.	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf	W16DC	W17DC	W18DC
研磨部寸法 [mm]	4×10	6×7.5	10×2.5	4×10	6×7.5	10×2.5

口腔内でご使用の際は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ滅菌を行ってからご使用ください。乾燥工程は避けください。

注意 ご使用の際は、過度な速度での作業と過度な押し付けは避けください。口腔内でご使用の際は、注水下で治療してください。  
EVE ダイヤセント プラス /27B2X00041000096/ 歯科用ゴム製研磨材、EVE ダイアセラ /27B2X00041000097/ 歯科用ゴム製研磨材、  
EVE ダイアセラ ポリッシャーセット 2/27B2X00041000250/ 歯科技工用研削・研磨器材キット 全て一般医療機器

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタル HP  
www.sundental.jp