


HK Simple Scaler

HK シンプル スケーラー [前歯部縁上用]

歯科衛生士 加藤 久子プロデュース

1本で多彩なスケーリングを実現する扱いやすさを追及したインストゥルメント
ステイン除去・プラーク除去・着色除去をシンプルに行える！

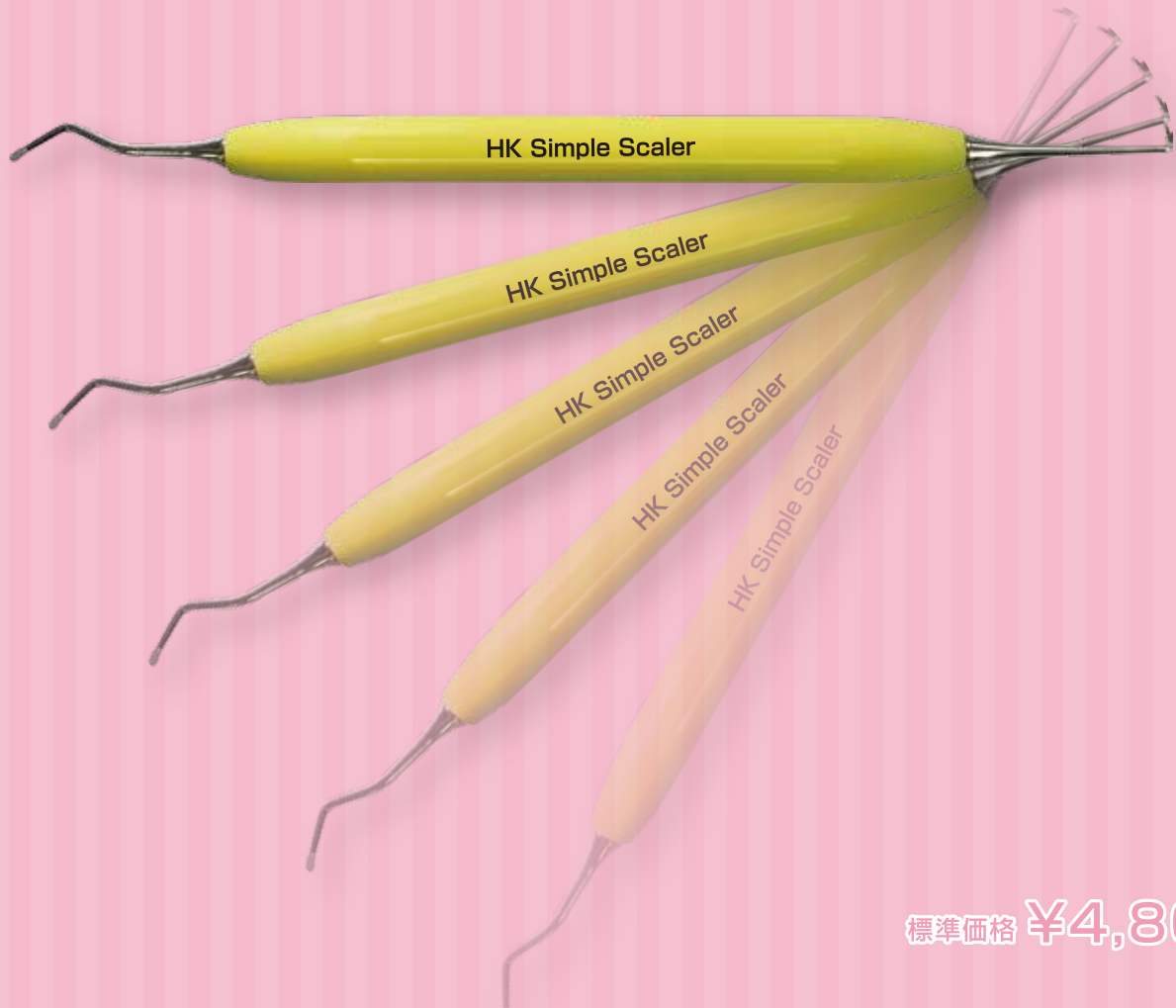

標準価格 ¥4,800

上顎前歯部唇側



上顎唇側から、隣接面へと移行していく場合、スムーズに刃先の操作が行え、効率が上がります。

下顎前歯部唇側面



叢生の歯牙でも、この小さい器具なら操作しやすいです。先端まで両刃が付与されているので、効率的な除去ができます。

上顎口蓋面



シャングの長さと同曲により到達性がよく、口蓋面へのアクセスが容易です。

下顎唇側面



しゃもじ型で先端部全体に刃付けがされているため、歯牙の形態に沿った器具操作が行いやすく、効率的に着色・プラーク・歯石の除去を行います。

HK Simple Scaler

HK シンプル スケーラー [前歯部縁上用]

ストレートシッケル

先端が両刃で、
叢生部や歯間部にもアクセスし易い



しゃもじ型ヘッド

効率的に操作できる
絶妙なカーブのしゃもじ型



歯科医療現場の願いを込めて 歯科衛生士加藤久子がプロデュース

- 🌿 エアロゾル感染の軽減：飛沫・交差感染軽減
- 🌿 叢生部・歯間部等へのアクセスが容易
- 🌿 訪問診療での持ち運びの負担を軽減
- 🌿 操作性の良さで誰もがマルチに扱いやすい



歯科衛生士 加藤 久子

日本歯科学院専門学校を卒業ののち、
ノースイースタン大学 Forsyth School For Dental Hygienists に
留学し、アドバンスデンタルハイジーンプログラムを修了。
コミュニティヘルスセンター（米国地域医療センター）勤務、
米国歯科医院勤務、
歯科エージェンシー勤務を経て、現在フリーランスとして数々の
セミナー講演や著書出版、専門誌寄稿を行っている。

製造販売元：株式会社背戸製作所 〒300-4223 茨城県つくば市小田 4596-1 Tel. 029-867-0376
販売名：HK シンプル スケーラー 一般的名称：08B3X10007000112 医療機器の分類：一般医療機器（クラス1）

●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●価格には消費税は含まれておりません。

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<http://www.sundental.jp>



@sundental.sam