

# 浮かせて使う小物専用洗浄バスケット！！

ウキ マックス

## UKI MAX-25


超音波洗浄器の底面から浮かせることにより、キャビテーション※が洗浄物の隅々に行き渡り、洗浄力効果を発揮！

※ 振動体により発生した泡が弾ける際の衝撃圧

アミ目



リーマ等の先端が  
突き出にくい細かい網を採用  
メッシュサイズ(=網サイズ)  
0.24×0.24 [mm]

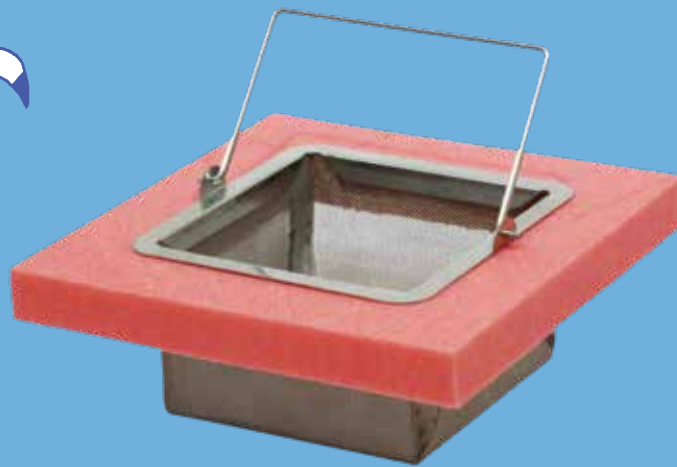

ウキマックス 25

ステンレスバスケット 1個  
フロート(ピンク色) 1個  
医院価格 ¥4,980 [税別]

別売品：

交換用フロート 3枚  
医院価格 ¥900 [税別]

サイズ：バスケット(内寸) 縦50mm×横50mm×深さ30mm  
フロート 縦86mm×横86mm×厚み10mm

材質：バスケット本体・取手 / ステンレス  
フロート / ポリエチレン樹脂発泡体

### ご使用例

- ◆ 他のインスツルメントと一緒に超音波洗浄器へ入れる場合

※超音波洗浄器の水槽体積や形状により、写真のように使用できない場合があります。



一度に超音波洗浄できる器具の重さ  
フロート1枚：約25gまで  
フロート2枚：約50gまで  
目安としてファイル、リーマは1本約0.2g

- ◆ 小物専用 超音波洗浄器を使用した場合



- ◆ フロート[ピンク色]を外せばバスケット単体でオートクレーブに使用できます

注意：フロートはオートクレーブ不可



製造元：有限会社秋山歯科器具製作所 販売元：サンデンタル株式会社

●掲載商品の価格は小売価格で、2024年9月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。●ご購入の際は出入りの歯科商店様、もしくは弊社までお問い合わせください。●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



超音波洗浄器専用 防錆・洗浄液

# グリシンクリーナー 10

グリシン型両性界面活性剤と防錆剤の力で、血液や脂肪分を完全に器具から引きはがし、高度な除菌効果を発揮します。

10倍希釈  
洗浄・除菌

優れた  
タンパク  
除去

容量 UP  
価格据置

さびを  
抑えて  
強力洗浄!

バー  
リーマー  
目詰り解消

**用途** 歯科用小器具（バー、ポイント、インスツルメント、トレイ等）、義歯、矯正装置に超音波洗浄器と併用してご使用ください。

**使用方法** 原液を 10 倍に希釈してください。

**特長** **洗浄力**：主成分グリシン型両性界面活性剤を配合する事により超音波洗浄器との相乗効果ですぐれた洗浄効果を発揮します。

**防錆力**：防錆剤を配合していますので洗浄等による器具等の錆の発生を防ぎます。

**除菌**：主成分グリシン型両性界面活性剤はすぐれた除菌効果と洗浄力が有り、超音波洗浄器と併用する事でより一層強力になります。

**成分**：グリシン型両性界面活性剤（ポリオクチルポリアミノエチルグリシン）、防錆剤・安定剤 等

**使用上の注意**

- 他の製品との併用は避けてください。
- 原液が目に入った場合 15 分以上水で洗い流し医師に相談してください。
- 液の交換は毎日行なってください。
- 間違えて飲み込んだりした場合は多量の水又は、コップ 1 ~ 2 杯の牛乳を飲ませてから医師に相談してください。



容量 1,200ml  
価格 ¥3,600 (税別)