

SD オートクリーン サンクスセール

オートクレーブ専用液&洗浄液

[2025—2026冬]

セール期間：2025年11月21日～2026年1月20日

オートクレーブ滅菌に使用する水道水または精製水の代わりに使い続けることで…



- チャンバー内の硬度成分（カルシウム、マグネシウム）等の付着を解消！
- 滅菌する器具を防錆&洗浄！

オートクリーンを使用するだけ…

オート
クレーブの
洗浄

オート
クレーブの
消臭

滅菌する
器具の
防錆

滅菌する
器具の
洗浄

が可能！

SD オートクリーン
サンクスセール 新規導入パック

初めての
ご購入に
オススメ



頑固な汚れが蓄積した
オートクレーブ内を
強力洗浄

オートクリーン ディスポ 500mL
オートクレーブ専用強力洗浄液



オートクリーン 5L
オートクレーブ専用液

オートクリーン ディスポ 500mL
通常価格 ¥2,000

&

オートクリーン 5L
通常価格 ¥4,300

||

合計 ¥6,300（税別）のところ…

セール価格 **¥4,300**（税別）

SD オートクリーン
サンクスセール お徳用パック



継続的な使用により
オートクレーブ内の
汚れ・臭いを防止

通常価格 ¥4,300×2個で ¥8,600（税別）のところ…

セール価格 **¥7,300**（税別）

※ 限定セットにつき、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。

SD

オートクレープ内のメンテナンスフリー洗浄液!! AUTO CLEAN

AUTO CLEAN DISPO

頑固な汚れが蓄積した オートクレープ内を強力洗浄!!


3ヶ月に1回、オートクリーンディスポを使用することにより
チャンバー内の酸化被膜や金属焼けを簡単に除去します。

強力洗浄



500mL 1,200mL
〈SDオートクリーン ディスポ〉

ご使用方法

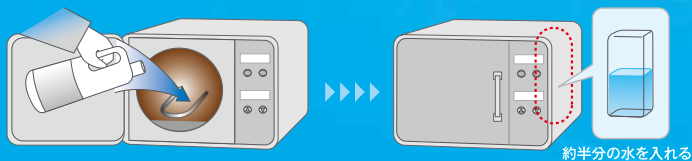

〔1〕SDオートクリーンディスポを直接
チャンバー内の水量センサーにかかる
まで入れます。

〔2〕貯水タンクに通常の約半分の水を入
れた状態でオートクレープを稼働してください。
(約20分) ※乾燥工程は省略してください。



〔3〕終了後、汚れのひどいところは柔ら
かい布などで軽く拭ってください。
※チャンパー内は非常に熱くなっている
のでご注意ください。

〔4〕作業完了後、貯水タンクの水をすべて
捨て、その後、SDオートクリーンを入れ通
常の滅菌作業を行ってください。
※貯水タンク内に汚れが溜まるため、再度
水をタンク内にためて、排水してください。

〈SDオートクリーン ディスポ〉

医院価格：500mL 2,000円(税別)／1,200mL 3,900円(税別)
成分：酒石酸・pH調整剤

AUTO CLEAN

チャンバー内の洗浄と 滅菌する器具の防錆洗浄!!

通常、オートクレープ滅菌に使う水道水又は
精製水の代わりに使用することでチャンパー内の
硬度成分(カルシウム、マグネシウム)等の付着を解消します。



〈SDオートクリーン 5L〉

洗浄

消臭

防錆




before



after

SDオート
クリーンに
切り替え30日後

ご使用方法

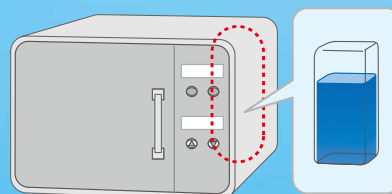

●オートクレープ内の液体をす
べて排水し、SDオートクリー
ンを薄めずに貯水タンクに適
量入れてください。

●貯水タンク内液量が減った場
合はSDオートクリーンを補充
してください。

●1ヶ月に1回、貯水タンク内の
液を抜き、新たにSDオート
クリーンを入れてください。

- 天然成分タンニンが持つ脱酸素力が防錆力を発揮します。
- オートクレープ内の臭い、汚れの蓄積を防ぎます。
- 高性能分散剤の効果で、硬度成分・シリカ・鉄分による湯垢などの付着を防止します。

〈SDオートクリーン 5L〉

医院価格：4,300円(税別)
成分：天然高分子タンニン・分散剤・pH調整剤

SD サンデンタル株式会社

〈本 社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
〈福岡営業所〉〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号

Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は