

器具器械65  
歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN41876000

## プラグー

### 【形状・構造及び原理等】



作業部：ステンレス製

把柄部：真鍮製

種類：ルートキャナルプラグー #80

ルートキャナルプラグー #100

ルートキャナルプラグー #120

根管充填器#1

根管充填器#2

根管充填器#3

### 【使用目的、効能又は効果】

[使用目的]

○ 歯科治療用

### 【品目仕様等】

○ 傷、バリがないこと。

### 【操作方法又は使用方法等】

[使用方法]

○ 本品は、根管内に充填物を主に軸方向に充填するために使用する。

[操作方法に関連する操作上の注意]

- 1) 使用前に洗浄・滅菌をしてから使用すること。
- 2) 本品は患者毎に取り換えて使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用目的以外は使用しないこと。
- 2) 使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。破損・曲がり等の原因になる。
- 3) 使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸し、除去すること。
- 4) 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄する時には、洗浄物同士が接触して刃先を破損することがないように注意すること。
- 5) 洗浄後、器具についた水分を除去し十分乾燥させてから滅菌パック等に入れオートクレーブ滅菌すること。
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びる恐れがあるので、湿度が低く清潔な場所に保管すること。
- ③ 本品は、歯科の従事者以外には触れないように適切に保管し、管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。又、長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ② 金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは器具の表面を損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

### 【包装】

○ 各種1本入包装

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：(株)背戸製作所

住 所：〒300-4217 茨城県つくば市杉木283-1

電 話 番 号：029-867-0376

F A X 番 号：029-867-0439