

Support Peg

Instant firing support

keystone
industries

サポートペグ インスタント焼成サポート材

築盛・グレース等後の焼成時に、補綴物を焼成ピン・焼成トレーに固定させるためのペースト状サポート材



キーストン サポートペグ/10g
¥3,000/1本 [税別]

特長&利点

- ニケイ酸リチウムやジルコニア等への築盛後の焼成時等に
- 着色等の汚染なし
- 何度焼成してもしっかり保持
- 400℃～1,300℃で使用可
- 乾燥工程不要
- 内面にこびりつかず、カンタンに除去可能！
- 焼成によるゆがみ等がない



粘性のあるペースト状

使用方法

1. クラウン・インレー等の裏面にサポートペグを盛る(a)
2. 焼成ピン・焼成トレーに固定(b)(c)
3. 焼成後、固化したサポート材はスポッと除去
余剰分は鉗子等でカンタン除去可能

こびりつかず、カンタンに除去可能！



クラウン内にペーストを充填 (a)



焼成用ピンに立てる (b)



焼成用ピンに立てる (c)

焼結後のジルコニアのマーゲンをチップング無しに薄く調整するための切削材

EVE

ジルコニア・ガラスセラミック・ポーセレンのマーゲン部用研削材 切削粒度：細目


EVE ダイヤコン ジルコニア・ガラスセラミック・ポーセレンのマーゲン部の形態修正、特にマーゲン調整に！



主な研削対象物：
ジルコニア（焼結後）・ガラスセラミック
ニケイ酸リチウムガラスセラミック
ポーセレン
粒度：細目
特長：
✓ マーゲン部等の繊細な部位の形態修正が可能に
✓ 多孔性で研削中の発熱を抑制
✓ 発熱を防ぎマイクロクラックを抑制
✓ 非常に少ない研削痕で研磨がラクに

推奨回転数：10,000～15,000rpm
最大回転数：20,000rpm

◎ダイヤモンド砥粒をポリウレタンで結合 ◎マーゲン部専用研削材

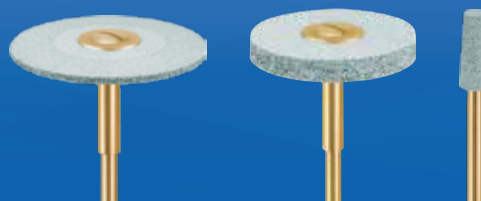

品番	DI-L26m	DI-R22m	DI-13m
サイズ (mm)	26×2.5	22×3	4×10
価格	¥5,700	¥4,800	¥1,500

EVE ダイヤコン 27B2X00041000242 / 歯科技工用ダイヤモンド研削材 / 一般医療機器

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
https://www.sundental.jp



@sundentaljapan

26086_02

ジルコニア・ニケイ酸リチウムガラスセラミックの最終的なツヤ出しを素早く・カンタンに！

ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト



2μmの天然ダイヤモンド砥粒配合で、

- ① ツヤ出しだけではなく若干の研磨能力により、微細な切削痕等のキズ取りが可能に
- ② 研磨最中はペーストのローズ色が乗り、滑沢になると油分を含まない地色が現れる
- ③ ペーストをブラシに塗布する際、回転するブラシを押し付けても飛び散りにくい
- ④ 超薄型スライド式ケースで、容器を指で挟んで保持しながらの研磨も可能に



研磨用途 【最終光沢研磨】
ジルコニア・ガラスセラミック・
ポーセレン・ハイブリッドセラミック
研磨砥粒 ダイヤモンド砥粒[2μ]
価格/容量 ¥5,800/8g

滑沢にすることで、
① 汚れの付着・色素の沈着を防ぐ
② 対合歯の摩耗を防ぐ

対合歯を摩耗させる原因は、
【硬さ】よりも【表面粗さ】が原因です。
特に咬合面は、本製品を塗布した柔軟性
のあるブラシで研磨を行うことで、
裂溝部もカンタンに滑沢になります。

ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット
焼成後のジルコニア研磨に適したブラシ2種を
セットにしました。

セット内容
ハトー ポリスタープロ ダイヤモンドペースト 8g×1
ハトー アストロブラシ ソフト #9-100×1
ハトー ブラシ (ハンドピース用) 100-10PP R22×1
価格 ¥7,400/キット

下記と組み合わせて使用するとより効果的に研磨可能！



歯面、咬合面の研磨に



咬合面の研磨に



咬合面の研磨に



研磨終了 自然なツヤ感に仕上がった

ローズ色が歯面上に残っている箇所は未研磨部（＝砥粒が大きい）で、
研磨後は色が消える（＝砥粒がなくなる）ので、未研磨部・研磨済部の判別がカンタンです。

研磨面は曇らず
光沢を放っています。



10,000

ハトー アストロブラシ ソフト #9-100

研磨対象部 歯面・咬合面等全体

推奨研磨対象部 歯面等の平坦部

利点 オールマイティに各部の研磨に使用可能

欠点 咬合面等の裂溝が深い箇所は、

ブラシのコシが足りず届きづらい

品番 #9-100	径 22mm
硬さ ソフト	入数 12本
材質 山羊毛	価格 ¥3,800



10,000

ハトー ブラシ (ハンドピース用) 100-10PP R22

研磨対象部 咬合面等全体

推奨研磨対象部 咬合面等の裂溝部

利点 深い裂溝部にも、ブラシにコシがあるため入り込む

欠点 直径が小さく、全体の研磨には不向き

品番 100-10PP	径 10mm
硬さ ソフト	入数 12本
材質 山羊毛	価格 ¥4,000



10,000

ハトー アストロブラシ ミディアム #9-114

研磨対象部 歯面・咬合面等全体

推奨研磨対象部 咬合面等の裂溝部

利点 深い裂溝部にも、ブラシにコシがあるため入り込む

欠点 ブラシが堅く、回転させて研磨剤に擦り付けた際に研磨剤が飛び散る

品番 #9-114	径 22mm
硬さ ミディアム	入数 12本
材質 馬毛	価格 ¥3,800

ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト / 27B2X00041000175、ハトー ブラシ (ハンドピース用) / 27B2X00041000039、ハトー アストロブラシ / 27B2X00041000141
ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット / 27B2X00041000177 全て 一般医療機器 / 歯科用研磨器材 / Hatho GmbH / ドイツ製 / 製造販売元：サンデンタル株式会社 / 画像提供 zahntechnik WeLT 吉田 亨 Dt

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<https://www.sundental.jp>



@sundentaljapan