

ラバラック D

超音波洗浄器専用 義歯洗浄液
歯科医院 / 歯科技工所専用

義歯ブラシによる**手洗い一切不要 !!**
超音波洗浄器でカンタン、手間いらず！

ラバラックD サンクスセール

キャンペーン期間:2026年6月1日(月)~2026年8月31日(月)

次亜塩素酸ナトリウム2%で強力洗浄！
超音波洗浄器との併用で洗浄がラク！



+



=

専用容器L
無料

数量
限定

ラバラックD サンクスセール
ニュー洗浄セット

ラバラックD 1.2L ¥4,500+
専用容器L ¥800

¥4,500

(税別)

※数量限定のため、なくなり次第終了と
させていただきます。

特別
価格



+



=

ラバラックD サンクスセール
5L(2個パック)

通常価格 ¥27,000

¥22,500

(税別)

ラバラック D


超音波洗浄器専用 義歯洗浄液
歯科医院 / 歯科技工所専用

使用方法




STEP 1

義歯や補綴物を専用容器で受け取ります。

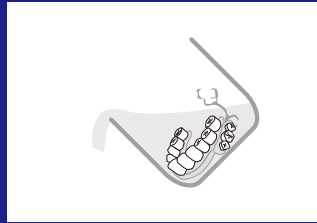


STEP 4

汚れが落ちているか確認をして、ラバラックDの廃液を捨てます。

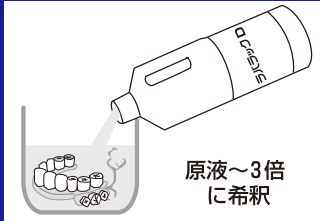

STEP 2

汚れに応じて原液～3倍に希釈したラバラックDで洗浄物を浸します。

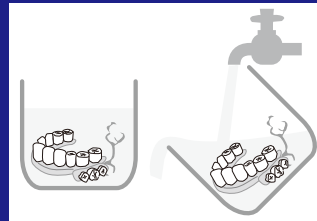

STEP 5

水を入れて1～2回すすいでください。



STEP 3

5～10分間超音波洗浄をします。



STEP 6

専用容器に新しい水を入れて、5分間程、超音波洗浄をします。塩素臭とぬめりを取り除くために必ず実行してください。

注 金属部分に次亜塩素酸が残留したまま放置すると、金属腐食の原因にもなります。

成分 次亜塩素酸ナトリウム 2.0%
界面活性剤 4.5%
防錆安定剤

性状 アルカリ性 pH 約12

用途 レジン床義歯 / 金属床義歯 / 脱離冠 / 脱離ブリッジ / ナイトガード / 矯正用リテーナー / スプリント / マウスガード / テンポラリークラウン / テンポラリーブリッジなどの洗浄

特長 ●ラバラック D は義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、ヤニ、茶シブなどを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。
●次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。
●防錆剤を配合していますので、金属にも安心して使用できます。

発注書

お取引先販売店様にご用命頂くか、下記内容をご記入の上 FAX.06-6245-7690 に送信ください。

貴歯科医院名・貴技工所名	ご担当者名
.....
ご住所	TEL ()
.....	FAX ()
.....
お取引先販売店名	お取引先販売店ご担当者様名
.....
ラバラック D サンクスセール ニュー洗浄セット	セット
.....
ラバラック D サンクスセール 5.0L (2個パック)	セット
.....

注意：ラバラック D サンクスセール 5.0L (2個パック) は 1 セット (2個パック) 単位での発注を宜しく願います。

表示価格は全て消費税を含みません